

## Dermatoskop NEW WASEEM

- halogenowy HAL-01
- diodowy LED-01



Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08

### INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

#### Opis produktu

Dermatoskop jest stosowany przez dermatologa do diagnozowania zmian skórnych. Zasilany jest dwiema bateriami. Opakowanie odporne na kurz.

#### Zakres zastosowania

Dermatoskop służy do diagnozowania chorób skóry.

#### BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zawsze używaj dermatoskop z dołączonym obiektywem. Odkręcić nakrętkę uchwytu i umieścić dwie baterie. Umocuj mocno głowicę do uchwytu i włącz go, przesuwając ją w lewo. Aby wyłączyć - przesunąć uchwyt w prawo.

#### Cechy urządzenia:

- Oświetlenie pola badanego lampą halogenową 2,5 V (model 01 HAL) lub diodą LED (model 01 LED)
- Oświetlenie ma barwę podobną do światła dziennego.
- 10-krotne powiększenie struktury skóry z ogniskowaniem, obiektyw achromatyczny.
- Dwie różne, przyjazne dla skóry płytki kontaktowe dostępne są ze skalą od 0 do 10 mm do dokładnego pomiaru zmian barwnikowych skóry oraz bez skali.
- Żarówkę (lub diodę LED) można szybko zastąpić u podstawy głowicy instrumentu
- Szttywne etui z tworzywa sztucznego odporne na kurz.

#### Czyszczenie

Czyścić zewnętrzne części miękką szmatką, wewnątrz wacikiem, w razie potrzeby nasączonym alkoholem izopropylowym.

### KONTAKT

#### Wytwórca:

New Waseem Trading Co.  
Pakistan  
Khadim Ali Road, Islam Street  
Sialkot 51310

#### Autoryzowany przedstawiciel i serwis:

Faheem Mir, Wielka Brytania  
32 HARTLEY ROAD  
London, MEDSURG E11 3BL

#### Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.  
Os. Wieniawa 57a  
64-100 Leszno



Sklep diaMedica:  
[www.diamedica.pl](http://www.diamedica.pl)

**diaMedica**  
biuro@diamedica.pl