

Instrukcja obsługi mankietu infuzyjnego Accoson 0,5l oraz 1.0l

ACCOSON

Uwaga: Wszelkie czynności odnoszą się do zasad postępowania z mankietem infuzyjnym Accoson i nie dotyczą postępowania z aparatem do przetoczeń oraz z obsługą pojemnika i płynów przetaczanych pacjentowi.



Aby wykonać przetoczenie pod ciśnieniem należy:

1. Przygotuj worek elastyczny z płynem do przetoczeń o pojemności 500 ml lub 1000 ml.
2. Rozpakuj mankiety infuzyjne z opakowania i zawieś go np. na wieszaku.
3. Włóż worek elastyczny z płynem, jaki ma być przetaczany pacjentowi do mankietu infuzyjnego w taki sposób, aby miejsce do podłączenia zestawu do przetoczeń było widoczne w dolnej części (jak na rysunku).
4. Podłącz do worka z cieczą zestaw i postępuj jak w procedurze przetaczania, wypełniając go płynem do przetoczeń.
5. Podłącz aparat z kaniulą wprowadzoną do ciała pacjenta.
6. Przy zakręconym zaworze mankietu infuzyjnego napompuj gruszką worek inflacyjny mankietu do żądanej wartości wspomagania (od 0 mmHg do 450mm Hg)
7. Zwolnij przepływ płynu w aparacie do przetoczeń.
8. Po zakończeniu przetoczenia zwolnij zawór mankietu infuzyjnego i opróżnij worek inflacyjny.
9. Mankiet zapakuj do opakowania fabrycznego.



Dodatkowe uwagi:

- Przechowuj w temperaturze pokojowej.
- Czyść bez użycia agresywnych środków chemicznych.
- Można czyścić wodą z łagodnym detergentem.
- Produkt nie zawiera latexu.

UWAGA: Nie wyrzucaj do kosza. Utylizuj jak odpady medyczne.



KONTAKT

CE 0473

Wytwórca i serwis:

Accoson Ltd.
Block 1, Grieg House,
Annickbank Campus,
Irvine, Ayrshire, KA11 4LF
Wielka Brytania
www.accoson.com

Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
Os. Wieniawa 57a, 64-100 Leszno
TEL: 65 619 3855
Sklep medyczny diaMedica:
www.diamedica.pl

AP PLAN **diaMedica**[®]
biuro@diamedica.pl

Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-11