

ELEKTRYCZNY KOC ROZGRZEWAJĄCY

BOSO 2xxx

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Modele:

- 2000, 2100, 2200, 2300 – mata pod prześcieradło
- 2400 – narzuta/peleryna

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Oferujemy najwyższej jakości, starannie przetestowane produkty do zastosowań w dziedzinie terapii ciepłem.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Zespół boso

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Nieprawidłowe zrozumienie poniższych informacji może doprowadzić do urazu (porażenie prądem, oparzenie skóry, zapalenie) lub do zniszczenia urządzenia. Poniższe informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa służą ochronie twojego zdrowia i zdrowia innych osób, jak i również ochronie urządzenia przed uszkodzeniem. Dlatego przeczytaj te informacje uważnie.

- Używaj tego urządzenia tylko do celów opisanych w tej instrukcji.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania w szpitalach.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby niepełnosprawne fizycznie, sensualnie lub umysłowo, a także przez osoby nie rozumiejące zasad działania i użytkowania urządzenia (w szczególności dzieci), chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie to nie powinno być również używane przez osoby, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować, małe dzieci, osoby niewrażliwe na ciepło (diabetycy, osoby ze zmianami chorobowymi skóry w miejscach stosowania urządzenia, osoby po spożyciu środków przeciwbólowych i alkoholu).
- Zbyt długie użytkowanie może doprowadzić do oparzenia.
- UWAGA: Nigdy nie kładź się spać, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie stosuj urządzenia do części ciała ze stanem zapalnym, z raną lub opuchlizną. W przypadku wątpliwości zasięgnij porady medycznej.
- Pole magnetyczne i elektryczne emitowane przez urządzenie może mieć wpływ na działanie rozrusznika serca. Jednakże, wpływ tych pól nie przekracza dopuszczalnych granic: natężenie pola elektrycznego: maks. 5000 V/m, natężenie pola magnetycznego maks. 80A/m, indukcja magnetyczna maks. 0.1 mT. Przed użyciem urządzenia, zaleca się jednak zasięgnąć konsultacji u lekarza lub producenta rozrusznika.
- Pamiętaj, urządzenia:
 - nie podłączaj do zasilania niezgodnego z urządzeniem
 - nigdy nie uruchamiaj bez nadzoru
 - nigdy nie uruchamiaj, gdy jest pofałdowane lub zwinięte
 - nigdy nie wkładaj pomiędzy inne przedmioty
 - nigdy ostro nie zaginaj

- nigdy nie używaj u zwierząt
- nigdy nie używaj, gdy jest mokre lub wilgotne
- przełącznik i kabel zasilający nie powinny być narażone na wilgoć
- Podczas użycia, elektroniczne elementy w przełączniku mogą się lekko nagrzewać. Dlatego przełącznika nigdy nie zakrywaj i nie umieszczaj go na urządzeniu podczas działania.
- Nie ciągnij i nie przekraczaj kabla
- Nie przypinaj pinesek i ostrych przedmiotów do urządzenia
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez dzieci, chyba że przełącznik został wstępnie ustawiony przez rodzica lub osobę odpowiedzialną lub dziecko zostało odpowiednio poinstruowane, jak bezpiecznie używać urządzenia.
- Dzieci powinny być skontrolowane, czy nie traktują urządzenia jako zabawki.
- Urządzenie powinno być co jakiś czas sprawdzane, czy nie występują na nim oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli wystąpiły takie oznaki lub gdy uległ uszkodzeniu kabel albo urządzenie działa nieprawidłowo, zwróć się do producenta lub sprzedawcy urządzenia przed dalszym użyciem.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel lub przez autoryzowany punkt naprawczy, gdyż naprawa wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Nieprawidłowe naprawy stanowią niebezpieczeństwo dla użytkownika.
- Pamiętaj, aby:
 - nie stawiać na macie żadnych przedmiotów, w szczególności gorących (szklanka z gorącym płynem, termofor, poduszka elektryczna itp.)
 - mata nie była owinięta pod materacem i nie klinowała się pomiędzy podwójnymi materacami obok siebie.

2. PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Przeznaczenie koca elektrycznego:

- Modele **bosotherm 2000, 2100, 2200, 2300** - mata rozgrzewająca przeznaczona do ogrzewania łóżka pod prześcieradłem.
- Model **bosotherm 2400** – zaprojektowany do ogrzewania ludzkiego ciała jako elektryczna narzuta (koc przykrywający) lub jako elektryczna peleryna (płaszcz). **Nie może służyć jako koc do leżenia.**

Koc nie jest przeznaczony do stosowania w szpitalach lub w zastosowaniach komercyjnych. W szczególności nie może być stosowany dla noworodków, małych dzieci, osób niewrażliwych na ciepło, osób niesamodzielnych i u zwierząt.

Przy pierwszym uruchomieniu, urządzenie może emitować zapach plastiku, który z czasem powinien zaniknąć.

3. OBSŁUGA


3.1 Bezpieczeństwo

To urządzenie posiada wbudowany **SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA**. Technologia czujnika elektronicznego chroni całą powierzchnię urządzenia przed przegrzaniem poprzez automatyczne wyłączenie w chwili wystąpienia zdarzenia świadczącego o usterce lub zagrożeniu. Jeżeli system bezpieczeństwa wyłączy urządzenie automatycznie w odpowiedzi na takie zdarzenie, to lampka kontrolna nie będzie świecić, nawet gdy urządzenie zostanie zaraz włączone. Pamiętaj, aby w takich wypadkach nie używać już więcej urządzenia i powinno być ono wysłane do serwisu.

3.2 Przygotowanie do użycia

Maty pod prześcieradło (bosotherm 2000, 2100, 2200, 2300):

- Zalecamy odkurzyć materac przed położeniem maty.
- Mata powinna leżeć na materacu równomiernie i pod prześcieradłem. Upewnij się, żeby mata była ułożona **bez pofałdowań** i nie marszczyła się podczas użytkowania.
- Zalecamy włączenie maty 30 minut (15 minut dla modelu **2300**) przed położeniem się na łóżku i przykrycie jej w tym czasie kołdrą lub grubą narzutą, aby zatrzymać ciepło.
- Mata dwuczęściowa w modelu **2300** została zaprojektowana, aby pasować do materacy o rozmiarach 35x80" (90-200 cm) oraz 38x80" (100-200 cm). Rozłóż matę na materacu, jak prześcieradło z gumką. Obszar wokół wezglowia maty anty-alergiczej nie jest podgrzewany. Wejście kabla powinno znajdować się mniej więcej na wysokości ramion (patrz ilustracja).

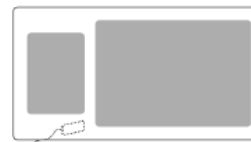

Aby uruchomić koc elektryczny, najpierw podłącz wyłącznik do odpowiedniego połączenia przy kocu. Następnie podłącz kabel zasilający do gniazdka ściennego.

3.3 Ustawienie temperatury

Najszybszym sposobem rozgrzania urządzenia jest włączenie od razu maksymalnego ustawienia temperatury. Następnie można włączyć niższy zakres wg uznania.

Zaraz po włączeniu urządzenia układ zaczyna krótko migać, kiedy urządzenie przeprowadza test kontrolny. Następnie zaczyna świecić w sposób ciągły. Zalecamy najniższy zakres temperatur przy długim, wielogodzinnym czasie używania.

Dostępne poziomy:

0. Wyłączony 1. Minimalne grzanie 2. Średnie grzanie 3. Maksymalne grzanie	Dla modelu bosotherm 2300, 2400 : 0. Wyłączony 1. Minimalne grzanie 2-5. Grzanie indywidualne 6. Maksymalne grzanie i poziom „antyalergiczny” (2300)
---	---


3.4 Funkcja automatycznego wyłączenia (bosotherm 2200, 2300, 2400)

W modelu maty elektrycznej **bosotherm 2200** oraz narzuty **2400** automatyczne wyłączenie następuje po 3 godzinach, a w modelu **2300** odpowiednio po 2, 6, 9 lub 12 godzinach wg ustawienia. Podczas rozgrzewania świeci się czerwona lampka. Gdy grzanie zostanie wyłączone przez timer, wówczas lampka czerwona zacznie migać.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, musisz najpierw przełączyć je na pozycję „0” i po ok. 5 sekundach możesz włączyć ponownie. Jeżeli urządzenie nie będzie używane po automatycznym wyłączeniu, powinno być wyłączone (pozycja „0”) lub odłączone z kontaktu.

4. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia, należy je wyłączyć z zasilania.
- Pokrowiec materiałowy może być czyszczony zgodnie z symbolami na etykiecie i powinien być przy tej czynności zdjęty (nie dotyczy urządzeń nie posiadających pokrowca).
- Mniejsze plamy mogą być usuwane za pomocą ściereczki lub gąbki z małą ilością detergentu do tkanin delikatnych.
- Pamiętaj, że aktualnie dostępne urządzenia nie mogą być prane w pralce automatycznej (za wyjątkiem niektórych modeli – patrz niżej), suszone i wyżymane maszynowo, czyszczone chemicznie, wykręcane i prasowane żelazkiem.
- Ponownie używaj urządzenia tylko wtedy, gdy urządzenie oraz pokrowiec są zupełnie suche.
- Nie zawieszaj urządzenia z użyciem klamerek do bielizny lub podobnych w trakcie suszenia.
- Koce elektryczne mogą być prane w pralce automatycznej.
 - Wybierz program łagodny w temperaturze:
 - Maty **2000, 2100, 2200**: 40 °C
 - Mata antyalergiczna **2300**: 60 °C
 - Narzuta **2400**: 30 °C.
 - Przed włożeniem do pralki odłącz od połączenia przetąchnika.
 - Zalecamy pranie urządzenia razem z innymi ubraniami.
 - Użyj środków piorących do tkanin delikatnych zgodnie z instrukcją.
 - Nie podłączaj kabla przed całkowitym wyschnięciem urządzenia i **nie uruchamiaj grzania, aby przyspieszyć suszenie.**
 - Zbyt intensywne pranie nie jest korzystne dla materiału, dlatego zaleca się, aby w ciągu całego swojego okresu eksploatacji urządzenie było **prane maksymalnie 5 razy.**

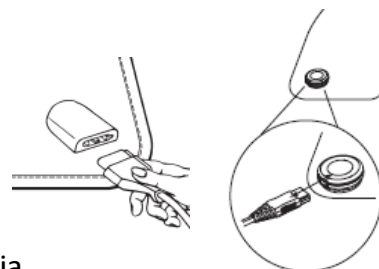

5. PRZECHOWYWANIE

Jeżeli nie masz zamiaru używania urządzenia przez dłuższy okres czasu, to zalecamy zapakowanie go oryginalnego opakowania i schowanie w suchym miejscu bez obciążania go innymi przedmiotami. Przedtem pozwól urządzeniu ochłodzić się do końca.

6. WYRZUCANIE

Jeżeli chcesz się pozbyć urządzenia postępuj zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG-WEEE. W razie pytań i wątpliwości sprawdź lokalne przepisy związane z gospodarką odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.



KONTAKT

Wytwórca i serwis:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG
Bahnhofstrasse 64
D-72417 Jungingen, Niemcy
tel: +49 7477-9275-0



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
Os. Wieniawa 57a
64-100 Leszno
Sklep medyczny: **diaMedica**
TEL: **65 619 3855**
www.diamedica.pl

