

ELEKTRYCZNE PODUSZKI I BUTY ROZGRZEWAJĄCE BOSO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



BOSCH + SOHN
GERMANY

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Oferujemy najwyższej jakości, starannie przetestowane produkty do zastosowań w dziedzinie terapii ciepłem. Niniejsza instrukcja obejmuje następujące urządzenia:

- rozgrzewające poduszki elektryczne **bosotherm 1xxx**
- rozgrzewające buty elektryczne **bosotherm 3000**

Dotyczy bosotherm 1600 – poduszka na szyję i kark

Położ poduszkę na barku i przeciągnij jej końce wzdłuż klatki piersiowej. Poduszkę utrzymują magnetyczne zaczepy. W celu lepszego dopasowania można użyć zatrzasków. Przy zdjęciu, wystarczy pociągnąć za końce poduszki i zwolnić zaczepy.

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Nieprawidłowe zrozumienie poniższych informacji może doprowadzić do urazu (porażenie prądem, oparzenie skóry, zapalenie) lub do zniszczenia urządzenia. Poniższe informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa służą ochronie twojego zdrowia i zdrowia innych osób, jak i również ochronie urządzenia przed uszkodzeniem. Dlatego przeczytaj te informacje uważnie.

- Używaj tego urządzenia tylko do celów opisanych w tej instrukcji.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania w szpitalach.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby niepełnosprawne fizycznie, sensualnie lub umysłowo, a także przez osoby nie rozumiejące zasad działania i użytkowania urządzenia (w szczególności dzieci), chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie to nie powinno być również używane przez osoby, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować, małe dzieci, osoby niewrażliwe na ciepło (diabetycy, osoby ze zmianami chorobowymi skóry w miejscach stosowania urządzenia, osoby po spożyciu środków przeciwbólowych i alkoholu).
- Zbyt długie użytkowanie może doprowadzić do oparzenia.
- UWAGA: Nigdy nie kładź się spać, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie stosuj urządzenia do części ciała ze stanem zapalnym, z raną lub opuchlizną. W przypadku wątpliwości zasięgnij porady medycznej.
- Pole magnetyczne i elektryczne emitowane przez urządzenie może mieć wpływ na działanie rozrusznika serca. Jednakże, wpływ tych pól nie przekracza dopuszczalnych granic: natężenie pola elektrycznego: maks. 5000 V/m, natężenie pola magnetycznego maks. 80A/m, indukcja magnetyczna maks. 0.1 mT. Przed użyciem urządzenia, zaleca się jednak zasięgnąć konsultacji u lekarza lub producenta rozrusznika.
- Pamiętaj, urządzenia:
 - nie podłączaj do zasilania niezgodnego z urządzeniem
 - nigdy nie uruchamiaj bez nadzoru

- nigdy nie uruchamiaj, gdy jest pofałdowane lub zwinięte
- nigdy nie wkładaj pomiędzy inne przedmioty
- nigdy ostro nie zaginaj
- nigdy nie używaj u zwierząt
- nigdy nie używaj, gdy jest mokre lub wilgotne
- przełącznik i kabel zasilający nie powinny być narażone na wilgoć
- Podczas użycia, elektroniczne elementy w przełączniku mogą się lekko nagrzewać. Dlatego przełącznika nigdy nie zakrywaj i nie umieszczaj go na urządzeniu podczas działania.
- Nie ciągnij i nie przekręcaj kabla
- Nie przypinaj pinesek i ostrych przedmiotów do urządzenia
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez dzieci, chyba że przełącznik został wstępnie ustawiony przez rodzica lub osobę odpowiedzialną lub dziecko zostało odpowiednio poinstruowane, jak bezpiecznie używać urządzenia.
- Dzieci powinny być skontrolowane, czy nie traktują urządzenia jako zabawki.
- Urządzenie powinno być co jakiś czas sprawdzane, czy nie występują na nim oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli wystąpiły takie oznaki lub gdy uległ uszkodzeniu kabel albo urządzenie działa nieprawidłowo, zwróć się do producenta lub sprzedawcy urządzenia przed dalszym użyciem.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel lub przez autoryzowany punkt naprawczy, gdyż naprawa wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Nieprawidłowe naprawy stanowią niebezpieczeństwo dla użytkownika.
- W przypadku niejasności, co do użytkowania urządzenia, prosimy o skontaktowanie się z serwisem.

2. WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Urządzenie to przeznaczone jest do ogrzewania wybranych miejsc ludzkiego ciała w celu poprawy krążenia i relaksacji mięśni.

To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w szpitalach lub w zastosowaniach komercyjnych. W szczególności nie może być stosowane dla noworodków, małych dzieci, osób niewrażliwych na ciepło, osób niesamodzielnych i zwierząt.

- Modele **bosotherm 1300, 1400, 1600, 1700** pokryte są oddychającym mikropolarem, który jest bardzo przyjemny dla skóry i z łatwością przystosowuje się do niej. Dzięki możliwości odpięcia przełącznika można je prać w pralce automatycznej (patrz – instrukcja czyszczenia).
- Modele **bosotherm 1200, 1300, 1400** mogą być używane bez fabrycznie dostarczonego pokrowca. Aby nie dopuścić do zabrudzenia lub uszkodzenia urządzenia zalecamy jednak stosować fabryczny pokrowiec, szczególnie gdy stosowane są wszelkiego rodzaju olejki aromatyczne lub balsamy.
- Model **bosotherm 1700** dzięki specjalnym zapięciom na rzep może być stosowany do różnych celów, np. na brzuchu, na plecach lub na stawach. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalną aplikację ciepła.

Przy pierwszym uruchomieniu, urządzenie może emitować zapach plastiku, który z czasem powinien zaniknąć.

3. OBSŁUGA

3.1 Bezpieczeństwo

To urządzenie posiada wbudowany **SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA**. Technologia czujnika elektronicznego chroni całą powierzchnię urządzenia przed przegrzaniem poprzez automatyczne wyłączenie w chwili wystąpienia zdarzenia świadczącego o usterce lub zagrożeniu. Jeżeli system bezpieczeństwa wyłączy urządzenie automatycznie w odpowiedzi na takie zdarzenie, to lampka kontrolna nie będzie świecić, nawet gdy urządzenie zostanie zaraz włączone. Pamiętaj, aby w takich wypadkach nie używać już więcej urządzenia i powinno być ono wysłane do serwisu.

3.2 Przygotowanie do użycia

Pop pierwsze sprawdź, czy wyłącznik jest podpięty do poduszki. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka elektrycznego.

W przypadku butów elektrycznych (model **bosotherm 3000**) przyjemny efekt grzania zapewnia już sam pluszowy materiał, bez konieczności podłączania prądu. Zalecamy jednak włączenie grzania na przynajmniej 15 minut, aby uzyskać najlepsze efekty.

3.3 Ustawienie temperatury

Najszybszym sposobem rozgrzania urządzenia jest włączenie od razu maksymalnego ustawienia temperatury. Następnie można włączyć niższy zakres wg uznania.

Zaraz po włączeniu urządzenia układ zaczyna krótko migać, kiedy urządzenie przeprowadza test kontrolny. Następnie zaczyna świecić w sposób ciągły. Zalecamy najniższy zakres temperatur przy długim czasie używania.

Dostępne poziomy:

0. Wyłączony
1. Minimalne grzanie
2. Średnie grzanie
3. Maksymalne grzanie

3.4 Funkcja automatycznego wyłączania

- W modelach z automatycznym wyłączaniem **90 min STOP**, grzanie zostanie przerwane po ok. 90 minutach ciągłego działania. Podświetlenie wyświetlacza zacznie świecić.



Aby ponownie uruchomić urządzenie, musisz najpierw przełączyć je na pozycję „0” i po ok. 5 sekundach możesz włączyć ponownie. Jeżeli urządzenie nie będzie używane po automatycznym wyłączeniu, powinno być wyłączone (pozycja „0”) lub odłączone z kontaktu.

3.5 Szybkie grzanie w modelu bosotherm 1300, 1500, 1600, 1700

Ten model poduszki elektrycznej posiada funkcję szybkiego grzania, która pozwala na szybkie rozgrzanie do najwyższej temperatury w ciągu 10 minut.




3.6 Dodatkowe mocowania w modelu bosotherm 1300

Szczególny kształt poduszki w tym modelu został zaprojektowany specjalnie do stosowania na obszarze pleców i karku. Górny rzep zapewnia właściwe umocowanie poduszki wokół szyi, a plecakowy zapięcie na dole pozwala na właściwe doregulowanie poduszki do ciała.

Zaczepty plecakowe wciśnij razem jednocześnie, aby je zapiąć. Aby je otworzyć, wciśnij jednocześnie haczyki blokujące.

4. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia, należy je wyłączyć z zasilania.
- Pokrowiec materiałowy może być czyszczony zgodnie z symbolami na etykiecie i powinien być przy tej czynności zdjęty (dotyczy tylko urządzeń posiadających oddzielny pokrowiec).
- Mniejsze plamy mogą być usuwane za pomocą ściereczki lub gąbki z małą ilością detergentu do tkanin delikatnych.
- Pamiętaj, że aktualnie dostępne urządzenia nie mogą być prane w pralce automatycznej (za wyjątkiem niektórych modeli – patrz niżej), suszone i wyżymane maszynowo, czyszczone chemicznie, wykręcane i prasowane żelazkiem.
- Ponownie używaj urządzenia tylko wtedy, gdy urządzenie oraz pokrowiec są zupełnie suche.
- Nie zawieszaj urządzenia z użyciem klamerek do bielizny lub podobnych w trakcie suszenia.
- Poduszki **bosotherm 1300, 1400, 1600, 1700** mogą być prane w pralce automatycznej.
 - Wybierz program łagodny w temperaturze 40°C (model **1300, 1400**) lub 30°C (model **1600, 1700**).
 - Przed włożeniem do pralki odłącz od połączenia przetwornika.
 - Ze względów ekologicznych, zalecamy pranie poduszki razem z innymi ubraniami.
 - Używaj proszkowych lub płynnych środków piorących do tkanin delikatnych zgodnie z instrukcją producenta.
 - Nie podłączaj kabla przed całkowitym wyschnięciem poduszki i **nie uruchamiaj grzania, aby przyspieszyć suszenie**.
 - Zbyt intensywne pranie nie jest korzystne dla materiału, dlatego zaleca się, aby w ciągu całego swojego okresu eksploatacji poduszka była prana maksymalnie 10 razy.
- W przypadku poduszek (**bosotherm 1300 i 1400**), podczas zakładania pokrowca, kabel powinien wychodzić w miejscu, gdzie kończy się zapięcie pokrowca.
- Buty elektryczne **bosotherm 3000** posiadają wyjmowany wkład z pluszowego materiału, który można prać ręcznie. Nie używaj butów gdy wkład nie zdążył jeszcze całkowicie wyschnąć.

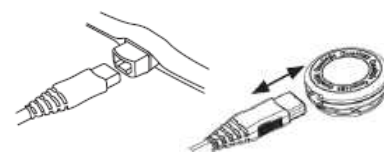

5. PRZECHOWYWANIE

Jeżeli nie masz zamiaru używania urządzenia przez dłuższy okres czasu, to zalecamy zapakowanie go oryginalnego opakowania i schowanie w suchym miejscu bez obciążania go innymi przedmiotami. Przedtem pozwól urządzeniu ochłodzić się do końca.

6. WYRZUCANIE

Jeżeli chcesz się pozbyć urządzenia postępuj zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG-WEEE. W razie pytań i wątpliwości sprawdź lokalne przepisy związane z gospodarką odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.



KONTAKT

Wytwórca i serwis:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG
Bahnhofstrasse 64
D-72417 Jungingen, Niemcy
tel: +49 7477-9275-0



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
Os. Wieniawa 57a
64-100 Leszno



Sklep medyczny: **diaMedica**

TEL: 65 619 3855

www.diamedica.pl