

Skarpeta do elektrostymulacji i-Sock



Do zastosowań z aparatami do stymulacji TENS i EMS.

Rozmiar: średni-uniwersalny

Zawartość zestawu:

- 2 skarpety i-Sock z adapterami snap/pin 2mm,
- 1 komplet 2 elektrod samoprzylepnych o wymiarach 5x9 cm wykorzystywanych jako druga elektroda (referencyjna).

Produkt przeznaczony do stosowania tylko przez jednego pacjenta.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Cechy skarpety i-Sock:

- Wykonana z rozciągliwego materiału przewodzącego o niskiej rezystancji z wysoką zawartością srebra.
- W celu wykonania stymulacji wymagana jest druga elektroda.

Zakładanie:

1. Upewnij się, czy elektrostymulator jest wyłączony.
2. Włóż jedną wtyczkę do gniazda połączenia wychodzącego z skarpety, a drugą wtyczkę (z tej samej pary przewodów danego kanału) podłącz do elektrody samoprzylepnej.
3. Załóż skarpetę na stopę.
4. Skarpeta może być wcześniej lekko zwilżona w celu lepszego przepływu prądu.
5. Drugą elektrodę naklej ok. 6-10 cm powyżej skarpety, na łydce.

UWAGA: Skarpeta i elektroda samoprzylepna powinny się znajdować na tej samej nodze.

Po założeniu obu elektrod (skarpety i elektrody samoprzylepnej) możesz włączyć elektrostymulator i uruchomić odpowiedni program.

Zdejmowanie:

1. Wyłącz elektrostymulator.
2. Zdejmij skarpetę i odklej elektrody. Elektrody nalep na folię ochronną i włóż do szczelnego woreczka plastikowego.

W razie potrzeby, można prać skarpetę ręcznie i suszyć na płasko w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania: rozrusznik serca, padaczka, nowotwór, rany w miejscu aplikacji.

UWAGA: W przypadku leczenia bólu spowodowanego neuropatią cukrzycową lub w innych stanach ograniczonego czucia lub jego braku, istnieje małe ryzyko, że przy ograniczonym lub nierównym kontaktowaniu elektrycznym może dojść do poparzenia lub podrażnienia skóry. W takich wypadkach należy w regularnych i częstych odstępach kontrolować stan skóry pod skarpetą.



KONTAKT

Wytwórca:

TensCare Ltd.
9 Blenheim Road Epsom
Surrey KT19 9BE,
Wielka Brytania
Tel: +44(0) 1372 723434



Autoryzowany przedstawiciel:

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street,
Swatar, BKR 4013, Malta
info@advenamedical.com



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
ul. Wolności 13M lokal 102, 64-130 Rydzyna
TEL: 65 619 3855
Sklep **diaMedica** www.diamedica.pl

