
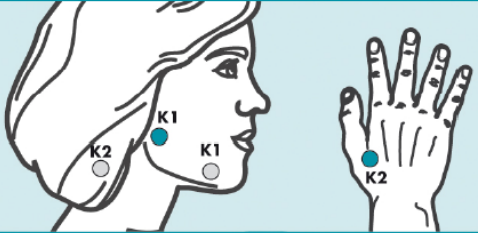



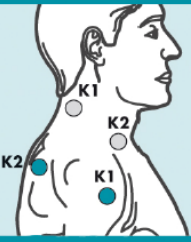
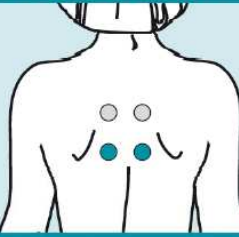
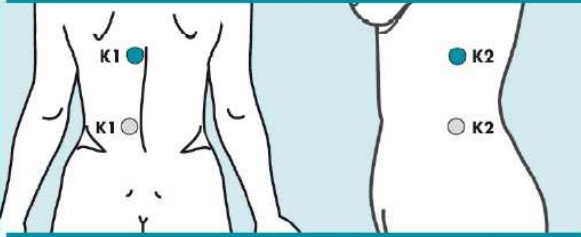
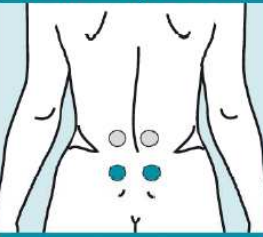
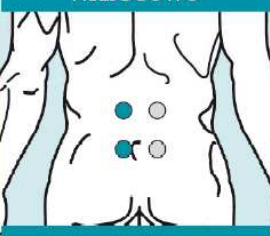





Elektrostymulator BMLS Impulse TENS D5. **Miejsce ułożenia elektrod i zastosowany program.**


<p style="text-align: center;">NEURALGIA NERWU TRÓJDZIELNEGO</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PR. CZAS 30 Min. PUNKTY A, B LUB C ZALEŻĄ OD MIEJSCA BÓLU</p>	<p style="text-align: center;">ZESPÓŁ TMJ</p>  <p style="text-align: center;">UDERZENIE II. CZAS 60 Min.</p>		
<p style="text-align: center;">MIGRENA</p>  <p style="text-align: center;">UDERZENIE II. CZAS 30 Min.</p>	<p style="text-align: center;">BÓLE GŁOWY POCHODZENIA SKURCZOWEGO</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PW. CZAS 30 Min.</p>	<p style="text-align: center;">BÓLE SZYI I BARKU</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PW. CZAS 30 Min.</p>	<p style="text-align: center;">ZESPÓŁ SPLOTU RAMIENNEGO</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PR. CZAS 30 Min.</p>
<p style="text-align: center;">BÓLE KRĘGOSŁUPA ODCINEK PIERSIOWY</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PW. CZAS 30-60 Min.</p>	<p style="text-align: center;">PÓŁPASIEC</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PR. CZAS 30 Min</p>		<p style="text-align: center;">BÓLE KRĘGOSŁUPA ODCINEK ŁĘDŹWIOWY</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PW. CZAS 30-60 Min.</p>
<p style="text-align: center;">RWA KULSZOWA / MIEJSCOWO</p>  <p style="text-align: center;">UDERZENIE II. Czas 15 Min.</p>	<p style="text-align: center;">RWA KULSZOWA / PROMIENIUJĄCY BÓL</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PR (250 mikrosekund). Czas 30 Min.</p>		<p style="text-align: center;">BÓLE BIODRA</p>  <p style="text-align: center;">TRYB PW. CZAS 30-60 Min.</p>

BÓLE MENSTRUACYJNE



UDERZENIE II; 30 Min.

ŁOKIEĆ TENISISTY



Prog. Mod.; 30 Min.

ZAPALENIE POCHEWEK ŚCIĘGIEN




STAŁY. 30 Min

PALEC, ZAPALENIE STAWÓW



**Stały (200µS/50Hz)
Timer 30 Min.**

BÓLE KOLAN

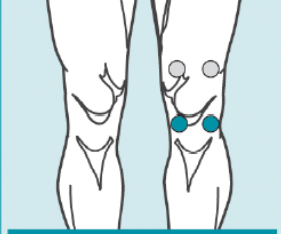

**Prog. Mod.
30-60 Min.**

STAW SKOKOWY




STAŁY. 30-60 Min.

BÓLE STÓP



UDERZENIE II; 30 Min.

BÓLE FANTOMOWE

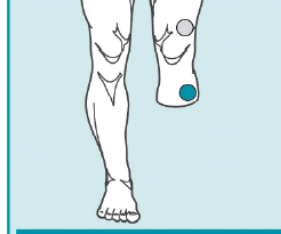

**UDERZENIE II
60 Min.**

ZAPALENIE ŚCIĘGIEN



**STAŁY 200 µS /2 Hz
Czas 30-60 Min.**