

JUŻ 65 LAT
POMAGAMY ZDROWO ŻYĆ

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
3 lata
GWARANCJI



Urządzenie
medyczne



Testowany
klinicznie

250
kPa
2,5
bar

Maksymalne ciśnienie

rok zał. 1949

TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA

ISO
13485



*Zestaw do inhalacji-nebulizacji
dla dzieci*




INHALATOR KOMPRESOROWY

MODEL: TM-NEB BABY

PL

Rys. A

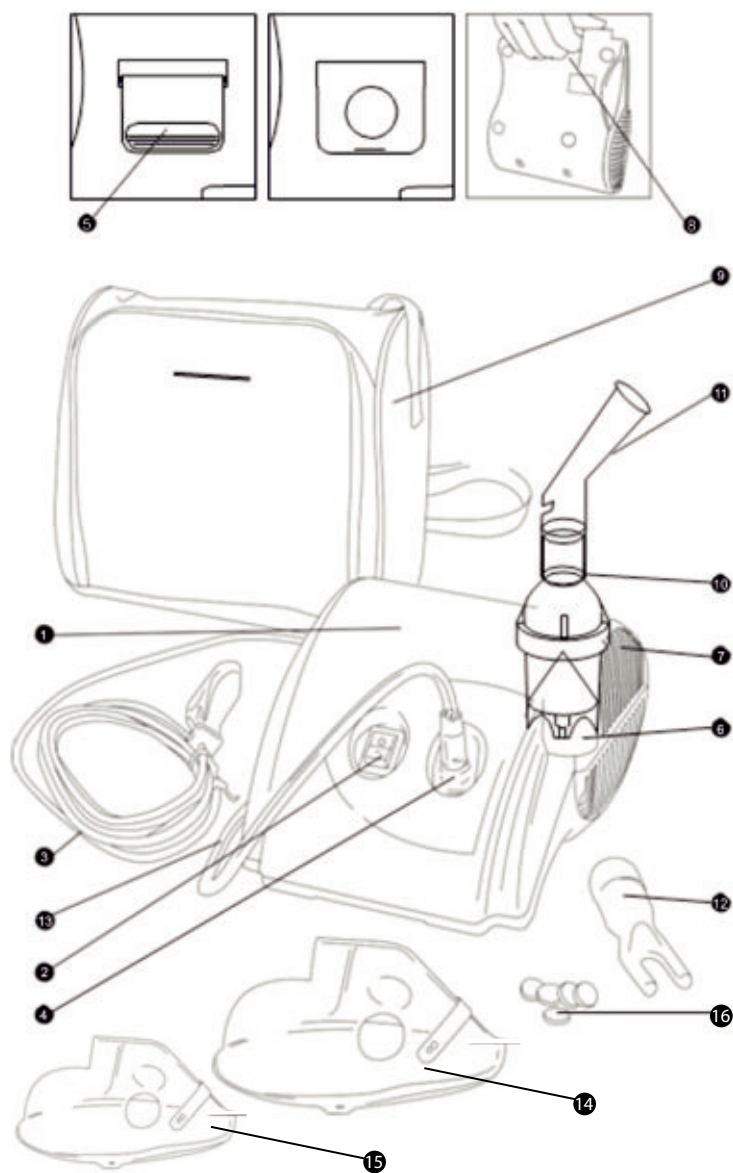

Rys. B



Rys. C



Rys. D



Rys. E



Rys. F



Rys. G



TM-NEB BABY

Inhalator kompresorowy

Części składowe:

TM-NEB BABY (Rys. A)

1. Obudowa kompresora
2. Przycisk włączania/wyłączania ON/OFF
3. Przewód zasilania
4. Wylot powietrza
5. Mocowanie filtra
6. Mocowanie nebulizatora
7. Otwory odpowietrzające
8. Uchwyt

Akcesoria w zestawie

9. Walizeczka do przenoszenia inhalatora
10. Nebulizator
11. Końcówka doustna
12. Końcówka do nosa
13. Przewód powietrzny
14. Maska dla dorosłych
15. Maska dla dzieci
16. Zapasowe filtry

Instrukcja użytkowania Inhalatora: TM-NEB BABY

Urządzenie TM-NEB BABY to zasilany prądem przemiennym DC zestaw nebulizatora z kompresorem powietrza, którego zadaniem jest zapewnianie źródła sprężonego powietrza dla celów medycznych. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania z nebulizatorem, w celu wytworzenia aerozolu cząstek leku do prowadzenia terapii inhalacyjnej zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.



Uwaga

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.



Uwaga

1. **Używaj niniejszego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji. I zgodnie z przeznaczeniem do terapii inhalacyjnej. Przestrzegaj zaleceń swojego lekarza.**
Każdy inny sposób używania jest niewłaściwy i może być niebezpieczny.
Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód spowodowanych niewłaściwym, nieprawidłowym lub nierozsądnym użyciem urządzenia, lub w przypadku podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa.
2. Niniejszą instrukcję należy zachować do korzystania w przyszłości.
3. Nie używaj urządzenia w obecności jakichkolwiek środków znieczulających, mieszanin palnych lub przy korzystaniu z butli tlenowej.
4. W przypadku awarii i/lub niewłaściwego działania, przeczytaj część instrukcji „Usuwanie problemów”.
5. Nie otwieraj obudowy kompresora, gdyż może to spowodować zagrożenie dla twojego życia i zdrowia oraz spowoduje utratę gwarancji.
6. Właściwe działanie urządzenia może ulec pogorszeniu w przypadku, gdy do urządzenia zostaną podłączone nieoryginalne części zamienne. (np. filtry, nebulizatory)
7. Przy korzystaniu z wszystkich urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym:
 - Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów i części;
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ponieważ urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody;
 - Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma;
 - Nie zostawiaj urządzenia na zewnątrz pomieszczenia;
 - Podczas używania umieść je na stabilnej poziomej powierzchni;
 - Upewnij się, że otwory odpowietrzające nie są zasłonięte;
 - Nie pozwól dzieciom ani osobom niepełnosprawnym fizycznie na korzystanie z urządzenia bez nadzoru;
 - Nie wyłączaj urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda.
8. Przed podłączeniem urządzenia do prądu upewnij się, że elektryczne parametry znamionowe podane na tabliczce znamionowej, na spodzie urządzenia, odpowiadają napięciu i częstotliwości w Twojej sieci.
9. Nie stosuj żadnych adapterów, prostych lub złożonych, i przedłużaczy.
10. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania, kiedy nie jest używane. Wyłącz urządzenie z gniazda elektrycznego, kiedy nie jest używane.
11. Przestrzegaj zaleceń wytwórcy przy instalowaniu urządzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód spowodowanych niewłaściwą instalacją.
12. Przewód zasilający nie może być wymieniany przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, skontaktuj się z działem obsługi klienta Tech-Med w celu wymiany kabla zasilającego (uszkodzenia mechaniczne nie podlegają warunkom gwarancji).
13. Przewód zasilający musi być zawsze w pełni rozwinięty, co zapobiega niebezpiecznemu przegrzaniu.
14. Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub wymiany filtra, odłącz urządzenie od źródła zasilania wyjmując wtyczkę z kontaktu lub wyłączając główne źródło zasilania.
15. Niektóre części urządzenia są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dzieci. Nie dopuść, aby dzieci lub osoby niepełnosprawne fizycznie miały dostęp do urządzenia bez nadzoru.
16. Jeżeli zdecydujesz się zaprzestać korzystania z urządzenia, zaleca się jego utylizację zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
17. Pamiętaj, aby:

- Używać urządzenia tylko do leków przepisanych przez lekarza;
- Używać akcesoriów zalecanych przez lekarza do prowadzenia terapii.

Instrukcja użytkowania



Uwaga: Przed użyciem wyjmij kompresor z walizeczki.

Przed pierwszym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem możliwych uszkodzeń w trakcie transportu. Podczas zabiegu siedź wyprostowany i rozluźniony.

1. Po rozpakowaniu urządzenia, sprawdź kompresor i akcesoria pod kątem widocznych uszkodzeń lub defektów, takich jak pęknięcia plastikowej obudowy, które mogły odsłonić części elektryczne. W przypadku odnalezienia uszkodzeń, skontaktuj się z działem obsługi klienta Tech-Med w celu zgłoszenia uszkodzonego wyrobu.
2. **Przed zastosowaniem urządzenia** wykonaj czynności czyszczenia opisane w części „**Czyszczenie i konserwacja**”.
3. Otwórz nebulizator przekręcając górną część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. B).
4. Upewnij się, że przegroda wewnątrz komory nebulizatora jest ustawiona poprawnie (Rys. C).
5. Wprowadź przepisaną ilość leku do pojemniczka na lek (Rys. D). Maksymalna pojemność napełnienia wynosi 6 ml.
6. Zamknij nebulizator trzymając za dolną część i przekręcając górną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, upewniając się, że pojemnik jest szczelnie zamknięty.
7. Podłącz jeden koniec przewodu powietrza do nebulizatora (Rys. E), a drugą do wylotu powietrza na urządzeniu (Rys. A.6).
8. Podłącz końcówkę doustną (Rys. A 11) do nebulizatora (Rys. F).
9. Przy korzystaniu z maski usuń końcówkę doustną i podłącz maskę bezpośrednio do nebulizatora (Rys. G).
10. Podłącz kompresor do gniazdka, upewniając się, że elektryczne parametry znamionowe podane na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia odpowiadają napięciu w Twojej sieci.
11. Rozpocznij zabieg włączając urządzenie poprzez ustawienie przycisku ON/OFF (Rys. A2) w pozycji „I”.



Uwaga

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do pracy nieciągłej w cyklu **30 min. pracy/ 30 min. spoczynku**.

12. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji „O” i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
13. Umyj nebulizator i akcesoria zgodnie z opisem w części „**Czyszczenie i konserwacja**”.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie kompresora:

Do czyszczenia urządzenia z zewnątrz używaj czystej suchej szmatki i łagodnych detergentów.



Uwaga

Podczas czyszczenia upewnij się, że wewnętrzne części urządzenia nie mają kontaktu z cieczami, a przewód zasilania jest odłączony.

Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów powietrza i maski:



Uwaga

Dla zapewnienia optymalnego działania urządzenia ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji czyszczenia.

Po każdym zabiegu:

Nebulizator należy wyczyścić myjąc go mydłem w płynie i wodą, a następnie zdezynfekować poprzez wygotowanie

w wodzie (maks. 10 minut) lub w autoklawie (maks. 121°C przez 10 minut). Sugeruje się dezynfekowanie maski i końcówki dustnej stosując zimne płyny dezynfekujące. Osusz nebulizator czystą szmatką. Po wysuszeniu, podłącz go do wyprowadzenia powietrza (Rys. A4) i włącz kompresor, aby sprawdzić poprawność działania po czyszczeniu.



Uwaga

Nie wygotowuj ani nie sterylizuj w autoklawie końcówki doustnej, przewodu powietrza ani maski.

Wymiana nebulizatora

Nebulizator należy wymienić po dłuższym okresie nieużywania lub w przypadku jego zablokowania przez wysuszony lek, pył, itd. Przy normalnym użytkowaniu nebulizator powinien wystarczyć przynajmniej na 6 miesięcy.

Wymiana filtra

Filtr należy wymienić po około 30 godzinach użytkowania lub, kiedy wygląda na zabrudzony. Otwórz mocowanie filtra (Rys. A5), aby wymienić filtr (Rys. A9) na nowy. Stosuj wyłącznie oryginalne filtry.



Uwaga

Nie używaj urządzenia bez filtra.

Usuwanie problemów

Urządzenia nie można włączyć:

1. Upewnij się, że wtyczka jest mocno wetknięta w gniazdko.
2. Upewnij się, że urządzenie pracowało zgodnie z ograniczeniami pracy podanymi w niniejszej instrukcji (30 minut włączone/30 minut wyłączone).

Urządzenie nie wytwarza aerozolu, lub nebulizacja jest bardzo słaba.

1. Upewnij się, że końcówki rurki powietrza są szczelnie zamocowane na urządzeniu i w nebulizatorze.
2. Sprawdź, czy nebulizator nie jest pusty lub, czy ilość leku nie jest za duża (maksymalne wypełnienie to 6 ml).
3. Sprawdź, czy dysza nebulizatora nie jest zapchana.
4. Sprawdź, czy przegroda jest prawidłowo wprowadzona (Rys. C).



Uwaga

Jeżeli po wykonaniu powyższych działań urządzenie nie pracuje poprawnie, skontaktuj się z działem obsługi klienta Tech-Med.

Konserwacja i naprawy

Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Urządzenie nie zawiera części podlegających serwisowaniu. Kompresor nie wymaga smarowania lub konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Model	TM-NEB BABY
Zasilanie	230V/50Hz
Waga	1,6 kg
Wymiary	(H) 95 X (L) 145 X (W) 170 mm
Pojemność komory nebulizatora	maks. 6 ml
Szybkość nebulizacji	0,26 ml/min
Wielkość cząstek	MMD (50%) < 5 mikronów MMAD 2,5 mikronów
Poziom hałasu	63 dBA
Maksymalne ciśnienie	250 kPa (2,5 bar)
Maksymalny przepływ	8,0 l/min
Przepływ operacyjny	4,0 l/min przy ciśnieniu operacyjnym 16 psi
Tryb pracy	Praca nieciągła 30 minut włączone/ 30 minut wyłączone

Urządzenie klasy II (podwójna izolacja ochronna)

Urządzenie typu B (urządzenie ze specjalnymi zabezpieczeniami przed zagrożeniami elektrycznymi).

Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.

Urządzenia nie należy wykorzystywać w obecności łatwopalnych substancji lub w obecności łatwopalnej mieszaniny środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.

Urządzenie nie nadaje się do stosowania w systemach do znieczulania lub wentylacji płuc.

Okres użytkowania urządzenia: 5 lat

Normy związane


Normy bezpieczeństwa elektrycznego EN 60601-1

Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z EN 60601-1-2

Warunki środowiska

Warunki magazynowania	
Temperatura	MIN. -25 °C – MAKS. 70 °C (-13 °F – 158 °F)
Wilgotność	MIN. 10% RH – MAKS. 95% RH
Warunki pracy	
Temperatura	MIN. 10 °C – MAKS. 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność	MIN. 10% RH – MAKS. 95% RH
Ciśnienie pracy	Działanie może zmieniać się wraz ze zmianami wysokości i ciśnienia atmosferycznego
Ciśnienie atmosferyczne	700 hPa– 1060 hPa

Krzywa rozkładu wielkości cząstek

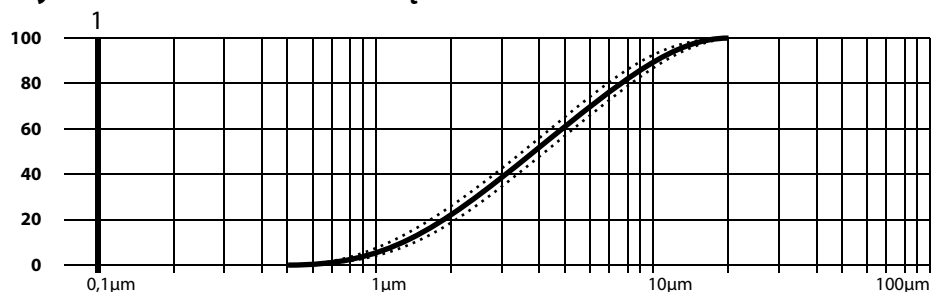

Oznaczenia kompatybilności elektromagnetycznej

1. Niniejsze urządzenie wymaga specjalnych zabezpieczeń związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), i należy je instalować i uruchamiać zgodnie z podanymi informacjami na temat EMC. Niniejsze urządzenie może podlegać wpływom przenośnych i mobilnych urządzeń do komunikacji radiowej.
2. **Uwaga:** Niniejsze urządzenie zostało dokładnie sprawdzone w celu zapewnienia właściwego działania i obsługi.
- 3.* **Ostrożnie:** Niniejszego urządzenia nie należy używać w pobliżu lub na innych urządzeniach, a jeżeli użytkowanie w pobliżu lub na innych urządzeniach jest konieczne, urządzenie należy obserwować w celu sprawdzenia poprawności działania w stosowanej konfiguracji.
4. **Ostrzeżenie:** Stosowanie AKCESORIÓW, przetworników i przewodów innych niż podane, z wyłączeniem przetworników i przewodów sprzedawanych przez WYTWÓRCĘ Zestawu Aero Plus kompresora z nebulizatorem jako części zamiennych dla części wewnętrznych może spowodować podwyższoną EMISJĘ lub zmniejszoną ODPORNOŚĆ zestawu TM-NEB BABY kompresor z nebulizatorem.

Wytyczne i deklaracje producenta - emisje elektromagnetyczne		
Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.		
Test na emisyjność	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Emisje o częstotliwości radiowej CISPR 11	Grupa 1	Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY wytwarza energię o częstotliwościach radiowych jedynie jako następstwo funkcji wewnętrznych. Zatem emisja o częstotliwościach radiowych jest znikoma i jest mało prawdopodobne, aby powodowała interferencję w urządzeniach elektronicznych w otoczeniu urządzenia.
Emisje o częstotliwości radiowej	Klasa B	Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY może być stosowane we wszystkich placówkach, włączając pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia bezpośrednio podłączone do sieci niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	
Wahania napięcia/Migotanie IEC 61000-3-3	Zgodne	

Wytyczne i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna

Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Testy odporności	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV dotykowe ±8 kV powietrzne	±6 kV dotykowe ±8 kV powietrzne	Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub z płytek ceramicznych. Jeżeli podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%.
Stany przejściowe i impulsy IEC 61000-4-4	±2 kV dla linii zasilających	±2kV dla linii zasilających	Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać poziomowi dla typowego środowiska .
Zaburzenia udarowe IEC 61000-4-5	±1 kV pomiędzy liniami	±1 kV tryb różnicowy	Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub szpitalnego.
Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilającego w liniach zasilających IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 0,5 cyklu 40% UT (60% zapad napięcia UT) przez 5 cykli 70% UT (30% zapad napięcia UT) przez 25 cykli <5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 5 sekund	<5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 0,5 cyklu 40% UT (60% zapad napięcia UT) przez 5 cykli 70% UT (30% zapad napięcia UT) przez 25 cykli <5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 5 sekund	Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jeżeli użytkownik Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY wymaga ciągłego zasilania podczas przerw w zasilaniu z sieci głównej, zaleca się zasilanie Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY z zasilacza UPS lub baterii.
Pole magnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej (50Hz/60 Hz), IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	JPole magnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej powinno być na poziomie odpowiadającym typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
 UWAGA: UT oznacza napięcie zmienne sieci zasilającej przed zastosowaniem poziomu testującego.			

Wytyczne i deklaracje producenta - odporność elektromagnetyczna

Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Testy odporności	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów zgodnie z 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz	3 Vrms	Przenośne i mobilne urządzenia do komunikacji radiowej nie powinny być stosowane w pobliżu żadnej części LLLT 808, w tym przewodów, w odległości mniejszej niż odległość zalecana wyliczona na podstawie odpowiedniego równania dopasowanego do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość $d = 1.167 \sqrt{P} \text{ 80 MHz do 800 MHz}$ $d = 2.333 \sqrt{P} \text{ 800 MHz do 2,5 MHz}$ gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc znamionową nadajników w watach (W) podaną przez producenta nadajnika, a d oznacza zalecaną odległość w metrach (m). Siła pola ze stałych nadajników radiowych, określona w drodze pomiaru zakłóceń elektromagnetycznych terenu, a powinna być niższa niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości. Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
 UWAGA 1: W przypadku 80 MHz i 800 MHz, obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Propagacja fal elektromagnetycznych jest zmieniana przez absorpcję i odbicia od konstrukcji, obiektów i ludzi.			
a) Nie jest możliwe dokładne teoretyczne określenie siły pola pochodzącego z nadajników stałych, takich, jak stacje bazowe dla telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej) oraz lądowych przenośnych nadajników radiowych, amatorskich, nadajników radiowych AM i FM oraz telewizyjnych. W celu ustalenia warunków elektromagnetycznych związanych ze stałymi nadajnikami radiowymi, należy przeprowadzić pomiary zakłóceń elektromagnetycznych w danej lokalizacji. Jeżeli zmierzona siła pola w lokalizacji, w której stosowany jest Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY, przekracza obowiązujący poziom zgodności podany powyżej, należy prowadzić obserwacje Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY, w celu zweryfikowania poprawności działania. W przypadku zaobserwowania nietypowego działania, mogą być niezbędne dodatkowe środki, na przykład zmiana położenia lub przeniesienie Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY. b) Dla zakresu częstotliwości 150 kHz to 80 MHz, siła pola powinna być niższa niż 3 V/m.			

Zalecana odległość pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej a Zestawem kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY.

Zestaw kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym o ograniczonych zakłóceniach wywoływanych przez fale radiowe. Odbiorca lub użytkownik Zestawu kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY może pomóc ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne poprzez utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a Zestawem kompresora z nebulizatorem TM-NEB BABY zgodnie z poniższymi zaleceniami, odpowiednio do maksymalnej wyjściowej mocy znamionowej urządzenia komunikacyjnego.

Maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika (W)	Odległość dostosowana do częstotliwości nadajnika (m)		
	150 KHz do 80 MHz $d=1.167\sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d=1.167\sqrt{P}$	800 MHz do 2,5 GHz $d=2.333\sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,689	3,689	7,379
100	11,667	11,667	23,333
W przypadku nadajników, których maksymalna wyjściowa moc znamionowa nie została wymieniona powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można oszacować stosując równanie odpowiednie dla częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc znamionową nadajników w watach (W) podaną przez producenta nadajnika.			
 UWAGA 1: W przypadku 80 MHz i 800 MHz, obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Propagacja fal elektromagnetycznych jest zmieniana przez absorpcję i odbicia od konstrukcji, obiektów i ludzi.			

Oznaczenia urządzenia



ON (zasilanie)



UWAGA:: Przeczytaj uważnie instrukcję



OFF (zasilanie)



Prąd przemienny



Typ B



Klasa II



Oddzielna utylizacja



Jeżeli na urządzeniu, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu jest umieszczony widoczny obok symbol oznacza to, że takiego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Należy go dostarczyć do punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. W unii Europejskiej i w innych krajach Europy działają specjalne systemy zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się zużytego produktu w sposób prawidłowy przyczyniasz się do zapobiegania zagrożeniu dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Recykling zużytych materiałów chroni zasoby środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w firmie wywożącej odpadki lub od sprzedawcy, u którego został on kupiony.



Notatki

[illegible]