



Instrukcja obsługi

Materiały

Korpus: Polistyren wysokoudarowy

Elektrody: Stal nierdzewna klasy medycznej

Przewody: Miedziane z izolacją PCV

Waga: 23,5g z przewodami, Długość przewodów: 30cm

Konektory: gniazda 2 x 2mm średnicy

Powierzchnia elektrod: 3 cm² na elektrodę

Czas użytkowania produktu: 6 miesięcy

Wskazania

Do zastosowania doodbytniczego u kobiet i mężczyzn, a także jako mała sonda waginalna u kobiet. Do użycia wyłącznie z urządzeniami do stymulacji mięśni oraz EMG biofeedback do leczenia nietrzymania moczu lub stolca typu wysiłkowego, z parcia i mieszanego.

Zaleca się, aby sonda była stosowana tylko z urządzeniami Neen Peritone lub Neen Pericalm.

Wyłącznie dla jednego pacjenta – może być używana ponownie tylko przez tą samą osobę.

Do zastosowania wyłącznie w jednym otworze ciała – nie stosować zamiennie dopochwowo i doodbytniczco.

Stosuj wg wskazań twojego lekarza.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować:

- u pacjentów ze stymulatorem serca.
- w ciąży!
- jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- w okresie infekcji, uszkodzenia tkanek pochwy lub bezpośrednio w okresie gojenia po zabiegach.
- w okresie menstruacji.
- u pacjentów z nowotworami w obrębie miednicy w historii choroby.
- gdy występują podrażnienia i jakiegokolwiek dyskomfort – skonsultuj to wtedy z lekarzem.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym czuciem w okolicy zastosowania. Zachować ostrożność u pacjentek z padaczką po wywiadzie. Zapytaj lekarza prowadzącego, czy można stosować urządzenie. Zachowaj szczególną ostrożność używając sondy ANUFORM® z urządzeniem generującym impulsy o natężeniu większym, niż 2 mA/cm². Nie stosuj w przypadku podrażnienia. Zawsze skonsultuj zastosowanie sondy z lekarzem lub rehabilitantem.

Czyszczenie

- Zawsze przed użyciem umyj sondę ciepłą wodą z mydłem.
- Wypłucz w bieżącej wodzie, wytrzyj i pozostaw do wyschnięcia.
- Powtórz zawsze czyszczenie po użyciu i upewnij się, czy sonda jest sucha przed przechowaniem.
- NIE STOSUJ wrzątku!
- Unikaj zanurzania przewodów w wodzie podczas czyszczenia.
- Nie stosuj autoklawów.

Pozbywanie się sondy

Pozbywaj się sondy zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi odpadów, po wcześniejszym dokładnym umyciu sondy.


Zawartość niklu

Metalowe elektrody mogą zawierać śladowe ilości niklu, co może wywoływać podrażnienia lub reakcje alergiczne przy dłuższym stosowaniu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA UŻYCIA

WAŻNE:

- Przed pierwszym i każdym następnym zastosowaniem umyj sondę w ciepłej (nie wrzątku!) wodzie z mydłem, opłucz i wysusz.
- Nałóż delikatną warstwę żelu przewodzącego na obydwie metalowe elektrody, aby ułatwić wprowadzenie sondy i poprawić dobre kontaktowanie elektrod z błoną śluzową.
- **Użycie doodbytnicze:** Umieść w odbycie, aż sonda prawidłowo się ustabilizuje po przejściu przez mięśnie zwieracza odbytu. Mięśnie te powinny otoczyć „szyjkę” - przewężenie na sondzie. Uchwyt kolisty powinien pozostać na zewnątrz.
- **Użycie dopochwowe:** Umieść sondę w pochwie w pozycji na boki „wschód-zachód” – metalowymi elektrodami w kierunku stawów biodrowych. Wsuwaj do czasu dotknięcia sklepienia pochwy. Uchwyt kolisty powinien pozostać na zewnątrz.
- Upewnij się, że elektrostymulator jest wyłączony przed połączeniem sondy z przewodami. Podłącz przewody do sondy.
- Postępuj zgodnie z zaleceniem swojego lekarza. Po użyciu wyłącz urządzenie, rozłącz kable i wyjmij sondę. Podczas wyciągania sondy, nie ciągnij za przewody.
- Wyczyść sondę, wysusz ją i schowaj – zgodnie z instrukcją obsługi.

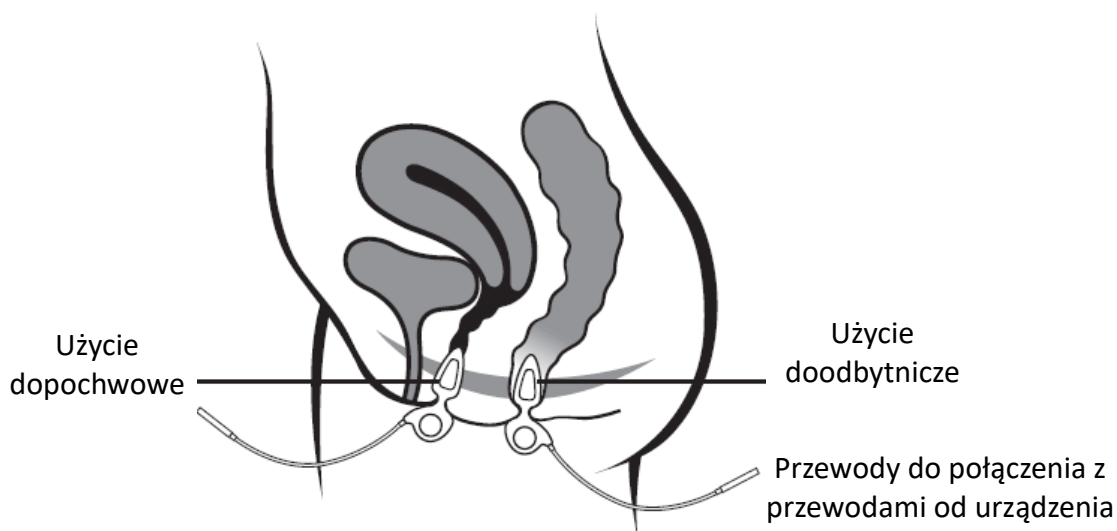

| | | | | |
|--|--|--|----|-----|
| WYTWÓRCA: Performance Health International Ltd Nunn Brook Rd, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 2HU Wielka Brytania SERWIS: TEL: +44 1623 448 706 | AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UE CEpartner4U Esdoornlaan 13 3951 DB Maarn HOLANDIA TEL: +31.343.442.524 | <table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table> CE 0413 | EC | REP |
| EC | REP | | | |
| Importer Dillenburg Medical B.V. Postbus 6 1800 AA Alkmaar, HOLANDIA T: +31 (0)72 5672090, E: info@dillenburg.com | DYSTRYBUTOR: AP Plan Sp.J. ul. Wolności 13M lokal 102 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 www.diamedica.pl | PLAN diaMedica biuro@diamedica.pl | | |

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia Neen ANUFORM®. Została opublikowana przez Performance Health International Ltd. Health International Ltd. nie gwarantuje jej treści i zastrzega sobie prawo do jej ulepszania i poprawiania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Poprawki zostaną jednak opublikowane w nowym wydaniu niniejszej instrukcji.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-20