

Sonda dopochwowa Periform[®]+

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Materiały

Korpus: Polistyren wysokoudarowy
Elektrody: Stal nierdzewna klasy medycznej
Przewody: Miedziane z izolacją PCV

Waga: 19g z przewodami

Długość przewodów: 340mm

Rozmiary: długość 94mm, szerokość: 34.7mm

Konektory: gniazda 2 x 2mm średnicy

Powierzchnia elektrod: 4.9cm² na elektrodę

Czas użytkowania produktu: 6 miesięcy

Wskazania

Leczenie za pomocą stymulacji wewnątrzpochwowej nietrzymania moczu z parcia, wysiłku i mieszanego za pomocą urządzenia do stymulacji mięśni i biofeedback'u EMG. Zaleca się, aby sonda była stosowana tylko z urządzeniami Neen Peritone lub Neen Pericalm.

Wyłącznie dla jednej pacjentki – może być używana ponownie tylko przez tą samą osobę.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować:

- u pacjentów ze stymulatorem serca.
- w ciąży!
- jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- w okresie infekcji, uszkodzenia tkanek pochwy lub bezpośrednio w okresie gojenia po zabiegach.
- w okresie menstruacji.
- u pacjentek z nowotworami w obrębie miednicy w historii choroby.
- gdy występują podrażnienia i jakikolwiek dyskomfort – skonsultuj to wtedy z lekarzem.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentek z osłabionym czuciem w okolicy zastosowania. Zachować ostrożność u pacjentek z padaczką po wywiadzie. Zapytaj lekarza prowadzącego, czy można stosować urządzenie. Zachowaj szczególną ostrożność używając sondy Periform[®] z urządzeniem generującym impulsy o natężeniu większym, niż 2 mA/cm². Nie stosuj w przypadku podrażnienia. Zawsze skonsultuj zastosowanie sondy z lekarzem lub rehabilitantem.

Czyszczenie

- Zawsze przed użyciem umyj sondę ciepłą wodą z mydłem.
- Wypłucz w bieżącej wodzie, wytrzyj i pozostaw do wyschnięcia.
- Powtórz zawsze czyszczenie po użyciu i upewnij się, czy sonda jest sucha przed przechowaniem.
- NIE STOSUJ wrzątku!
- Unikaj zanurzania przewodów w wodzie podczas czyszczenia.
- Nie stosuj autoklawów.


Pozbywanie się sondy

Pozbywaj się sondy zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi odpadów, po wcześniejszym dokładnym umyciu sondy.

Zawartość niklu

Metalowe elektrody mogą zawierać śladowe ilości niklu, co może wywoływać podrażnienia lub reakcje alergiczne przy dłuższym stosowaniu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

Rysunek 1

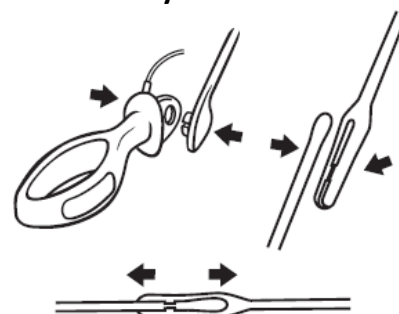

INSTRUKCJA UŻYCIA

WAŻNE:

- Przed pierwszym i każdym następnym zastosowaniem umyj sondę w ciepłej (nie wrzątku!) wodzie z mydłem, opłucz i wysusz.
- Nałóż delikatną warstwę żelu przewodzącego na obydwie metalowe elektrody, aby ułatwić wprowadzenie sondy i poprawić dobre kontaktowanie elektrod z błoną śluzową.
- Gdy stosujesz wskaźnik skurczy, umocuj go przed włożeniem sondy do pochwy (rys. 1).
- Umieść sondę w pochwie w pozycji na boki „wschód-zachód” – metalowymi elektrodami w kierunku stawów biodrowych. Nie umieszczaj zbyt głęboko, kołnierz zewnętrzny musi być umieszczony między wargami większymi.
- Upewnij się, że elektrostymulator jest wyłączony przed połączeniem sondy z przewodami. Podłącz przewody do sondy.
- Postępuj zgodnie z zaleceniem swojego lekarza. Po użyciu wyłącz urządzenie, rozłącz kable i wyjmij sondę. Podczas wyciągania sondy, nie ciągnij za przewody.
- Wyczyść sondę, wysusz ją i schowaj – zgodnie z instrukcją obsługi.

Wskaźnik skurczy


Kiedy sonda PERIFORM®+ jest stosowana ze wskaźnikiem skurczy, staje się on cennym dowodem siły mięśni dna miednicy mniejszej. Można go używać razem z samą sondą niepodłączoną do niczego lub podłączoną do elektrostymulatora czy urządzenia do biofeedback'u EMG. Gdy skurcz mięśni dna miednicy jest prawidłowy, wówczas wskaźnik będzie poruszał się w dół (✓). Ruch w górę oznacza nieprawidłowe skurcze (X), co obrazuje rysunek 2.

Wskaźnik pozwala ponadto na:

1. Określenie ilościowo siły skurczu i czasu jego trwania zarówno skurczu wywołanego impulsem z aparatu, jak i skurczu woluntarycznych (ćwiczenia samej pacjentki) – takie skurcze mogą być stosowane do podtrzymania skurczu wywołanych stymulatorem.
2. Ukazanie potrzeby stosowania stymulacji, aby wzmocnić słabe mięśnie dna miednicy mniejszej, tzn. gdy ruch wskaźnika jest niewielki lub nie ma go wcale.
3. Ćwiczenia technik ściskania, aby uniknąć wycieku moczu przy kaszlu i wysiłku.
4. Pokazanie postępu ćwiczeń mięśni dna miednicy.

Aby podłączyć wskaźnik:

Wskaźnik należy podłączyć do sondy przed zastosowaniem sondy. Delikatnie umieść płaską końcówkę pomiędzy przewodami. Delikatnie przesunij końcówkę wskaźnika, aż dojdzie do końca sondy.

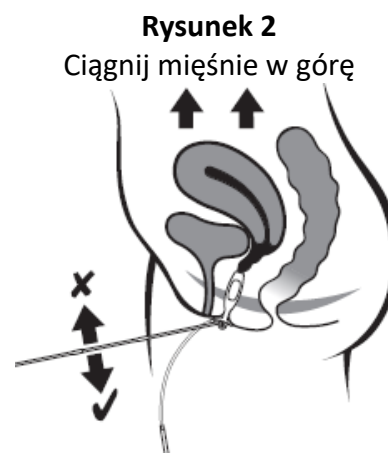

WYTWÓRCA: Performance Health International Ltd Nunn Brook Rd, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 2HU Wielka Brytania SERWIS: TEL: +44 1623 448 706	AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UE CEpartner4U Esdoornlaan 13 3951 DB Maarn HOLANDIA TEL: +31.343.442.524 EC REP CE 0413
Importer Dillenburg Medical B.V. Postbus 6 1800 AA Alkmaar, HOLANDIA T: +31 (0)72 5672090, E: info@dillenburg.com	AP Plan Sp.J. ul. Wolności 13M lokal 102 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 www.diamedica.pl AP diaMedica PLAN biuro@diamedica.pl

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia Neen PERIFORM®. Została opublikowana przez Performance Health International Ltd. Health International Ltd. nie gwarantuje jej treści i zastrzega sobie prawo do jej ulepszania i poprawiania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Poprawki zostaną jednak opublikowane w nowym wydaniu niniejszej instrukcji.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-20