


Aspirator do nosa Rycom

Model: NC001/NC003

Instrukcja obsługi

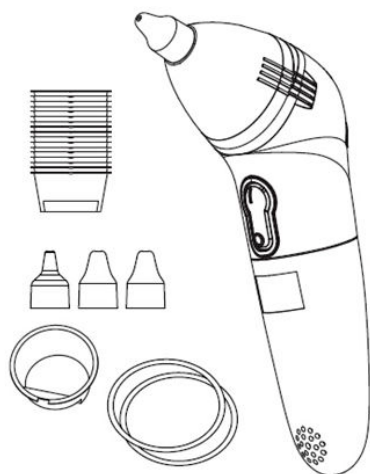

Rycom[®]

Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	2
Uwagi przed użyciem.....	2
Cechy produktu	2
Porady.....	2
Dane techniczne	2
Budowa aspiratora	3
Instalacja baterii	3
Akcesoria	3
Montaż i uruchomienie aparatu.....	4
Rozwiązywanie problemów.....	4
Konserwacja.....	4



Przed użyciem termometru, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniego poinformowania.

<p>Wytwórca: Guangzhou Jinxinbao Electronic Co., Ltd Address: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town, Nansha, Guangzhou, Chiny</p>	<p>Dystrybucja globalna: Rycom Electron Technology Limited Unit 503, 5/F., Silvercord Tower 2, 30 Canton Rd., Hong Kong</p>
<p>Autoryzowany Przedstawiciel w UE: Wellkang Ltd Suite B 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, Wielka Brytania Tel: +44(20)30869438,32876300</p> <p style="text-align: right;">   </p>	<p>Import/dystrybucja i serwis w Polsce: AP Plan Sp.J. Os. Wieniawa 57a 64-100 Leszno TEL: 65 619 3855 www.diamedica.pl</p> <p style="text-align: right;">  <small>PLAN</small> <small>biuro@diamedica.pl</small> </p>

Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-09

Drogi Kliencie

Dziękujemy za zakup elektronicznego aspiratora do nosa dla dziecka.

Mamy nadzieję, że instrukcja użytkowania będzie przydatna i zalecamy uważnie przeczytać ją, aby łatwo dobrze oczyszczać nos dziecka.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Urządzenie nie powinno być używane do usuwania zczopowanego śluzu w nosie noworodka i niemowlęcia. Nie wolno używać go do żadnych innych celów.
2. Należy używać akcesoriów dostarczanych przez producenta.
3. Nie rozkręcaj i nie upuszczaj urządzenia, gdyż to spowoduje to jego uszkodzenie.
4. Dbaj o urządzenie i przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Używaj jednorazowych baterii alkalicznych, nie stosuj akumulatorów.
6. Wyjmij baterie z urządzenia, gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wymiany baterii.
7. Postępuj zawsze zgodnie z instrukcją.

Uwagi przed użyciem

1. Nie zapomnij o zimnej sterylizacji akcesoriów przed i po każdym użyciu, w tym sond.
2. Umyj ręce przed użyciem akcesoriów.
3. Regularnie sprawdzaj wodoodporność uszczeliek.
4. Nie zanurzaj urządzenia w jakiegokolwiek cieczy.

Cechy produktu

- Trzy opcje dla aspiracji (dla NC001)
- Trzy opcje dla muzyki (dla NC001)
- Trzy opcje rozmiaru sondy (dla NC001 / NC003)

Niniejszy aspirator nosowy do pielęgnacji niemowląt jest łatwy w obsłudze, łagodny dla dziecka i posiada zarazem dużą wydajność.

Ponieważ dzieci młodsze niż 12 miesięcy mogą oddychać tylko przez nos, ważnym jest, aby w przypadku choroby regularnie czyścić nos z wydzielanego śluzu.

Porady

1. Umyj ręce przed podjęciem czynności u swojego dziecka.
2. Ułóż głowę dziecka w pozycji pionowej podczas pracy urządzenia.
3. Sprawdź, czy przed rozpoczęciem ssania, wydzielina jest wilgotna.
4. Dziecko musi mieć otwarte usta podczas zasysania wydzieliny.
5. Unikaj źródeł zakażenia.
6. Nie całuj chorego dziecka.
7. Nie całuj dziecka, gdy jesteś chora/chory.
8. Staraj się izolować chore dzieci.
9. Zachowaj higienę przedmiotów należących do dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych problemów, skontaktuj się z dystrybutorem.



Dane techniczne

Maksymalna moc ssania 100%: 50kPa

Menu		0	1	2	3
ASP	Moc ssania	-	30% Słaba	70% Średnia	100% Wysoka
MUS	Muzyka	Wyłączona	Opcja Nr 1	Opcja Nr 2	Opcja Nr 3
VOL	Głośność		Niska	Średnia	Wysoka


Ustawienia wstępne: ASP:2 / MUS:1 / VOL:2

Budowa aspiratora

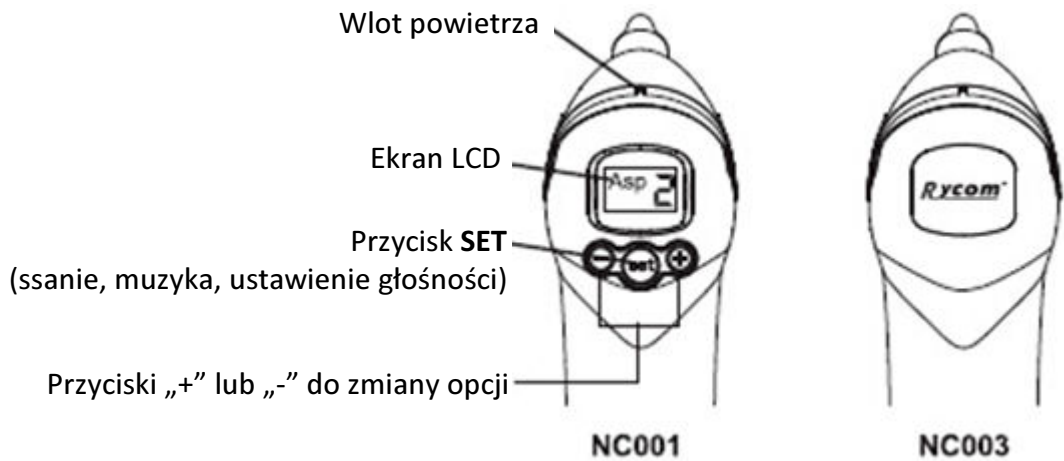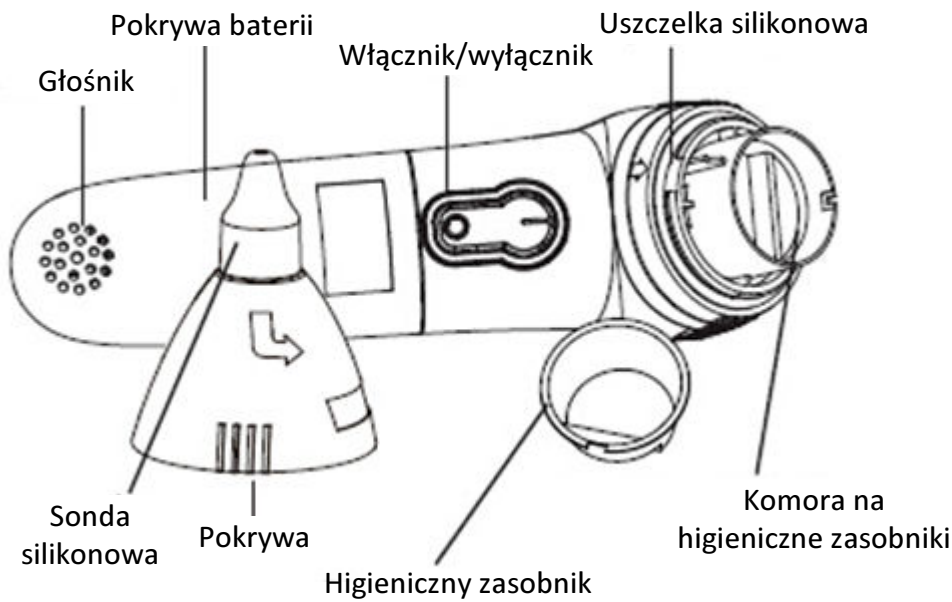


Instalacja baterii

1. Otwórz obudowę poprzez pociągnięcie pokrywy komory baterii w dolnej części urządzenia.
2. Włóż baterie AA pamiętając o odpowiedniej polaryzacji.
3. Nie używaj akumulatora i nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
4. Zamknij komorę baterii.

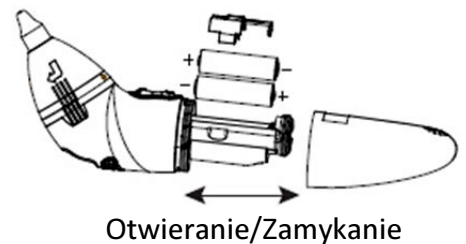

Akcesoria

- 3 sondy silikonowe
- 2 uszczelki
- 25 higienicznych zasobników
- 2 baterie alkaliczne AA

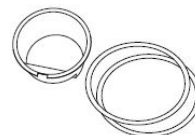

Montaż i uruchomienie aparatu


A. Po włożeniu baterii (1) (gdy używasz urządzenia po raz pierwszy), zamocuj zasobnik higieniczny (4) do podstawy uszczelniającej (3).

B. Upewnij się, czy uszczelka silikonowa (2) jest w prawidłowej pozycji, aby zagwarantować właściwą szczelność.

C. Załóż pokrywę (5) we właściwym miejscu, przekręć ją, aby właściwie uszczelnić zamknięcie.

D. Użyj odpowiedniej końcówki silikonowej (6):

1. Różowa - dla noworodka do trzech miesięcy;
2. Niebieska - dla dziecka od trzech miesięcy do dwunastu miesięcy.
3. Pomarańczowy - dla dziecka powyżej dwunastu miesięcy.

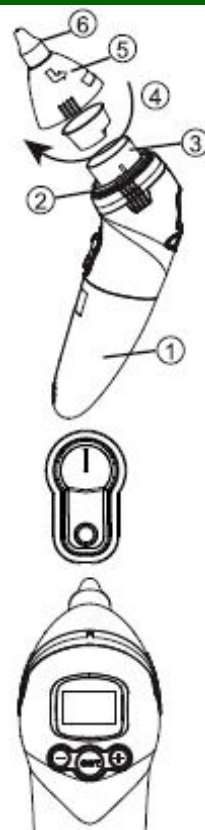

Uruchomienie aparatu:

1. Włącz urządzenie naciskając na przycisk „1”.
2. Wciśnij przycisk „SET” i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby aktywować aspirację - na ekranie pojawi się „ASP”.
3. Za pomocą przycisków „+” i „-” ustaw siłę ssania. (1-słabo, 2 średnio, 3-najwyższa siła).
4. Ponownie naciśnij klawisz "SET", aby ustawić muzykę - "MUS", wybierz muzykę przyciskami „+” i „-” (0: wyłączona; Opcja nr 1, nr 2, nr 3).
5. Ponownie naciśnij klawisz "SET", aby ustawić poziom głośności – „VOL” za pomocą „+” i „-” (Vol 1, VOL 2 i 3 VOL).

Ważne uwagi:

- Upewnij się, że usta dziecka są otwarte podczas pracy, aby był obieg powietrza w jamie nosznej.
- Nie należy ssąc dotykać ściany jamy nosowej.
- Wykonuj bezpieczne, wolne ruchy, aby nie dopuścić do bólu u dziecka.
- Gdy jest to konieczne, wymień zasobnik higieniczny na nowy.

⚠ Gdy stosujesz roztwór soli fizjologicznej, po zmieszaniu z wydzieliną nosa może penetrować do oskrzeli.

⚠ Upewnij się, że dziecko ma otwarte usta podczas czyszczenia.

⚠ Usuń zasobnik higieniczny, gdy jest zużyty oraz czyścić urządzenie odpowiednim detergentem.

⚠ Nie zanurzaj urządzenia w jakimkolwiek płynie.

⚠ Sterylizuj przed każdym zastosowaniem.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli pojawi się którykolwiek z podanych poniżej problemów, zastosuj podane rozwiązanie.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą aparatu.

Problem	Rozwiązanie
Nieprawidłowe ssanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź połączenia. 2. Sprawdź, czy końcówka higieniczna jest nałożona prawidłowo. 3. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo złożone
Brak reakcji na włączanie	Sprawdź polaryzację baterii.

Konserwacja

1. Do czyszczenia urządzenia używaj odpowiedniego detergentu.
2. Odkręć ruchomą komorę i wysterylizuj wrzącą wodą lub parą, ale nie w kuchenke mikrofalowej.
3. Po sterylizacji, urządzenie należy czyścić suchą i miękką ściereczką.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgoci.
5. Nie używaj do czyszczenia urządzenia erozyjnych chemikaliów.

Uwaga: Usuń baterie, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane przez dłuższy czas.