

Elektrody Perfect mama

Zestaw 4 elektrod wielokrotnego użytku z przewodami zintegrowanymi, przeznaczonych do urządzeń mamaTENS, perfect mamaTENS oraz perfect mama+.

Kod produktu: **E-CM50100PM**



INSTRUKCJA OBSŁUGI



PRZED UŻYCIEM, UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI !

Aplikacja elektrod:

1. Wyjmij elektrody z woreczka do przechowywania i delikatnie rozplącz przewody.
2. Upewnij się, że urządzenie **mamaTENS**, **perfect mamaTENS** lub **perfect mama+** jest wyłączone. Gdy elektrody nadal znajdują się na plastikowych foliach ochronnych, podłącz dwie wtyczki przewodów do urządzenia.
3. Ustal miejsce umieszczenia elektrod na skórze - zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia lub zaleceniami położnej albo personelu medycznego.
4. Przed aplikacją umyj skórę i dokładnie ją osusz. Skóra musi być wolna od kremów i balsamów na bazie oleju, ponieważ mogą one uszkodzić warstwę samoprzylepną żelu.
5. Przyłóż środek elektrody do skóry, a następnie wygładź ją ku brzegom. Zachowaj folie ochronne, aby po użyciu móc bezpiecznie przechowywać elektrody.
6. Podczas użytkowania upewnij się, że przewody wszystkich czterech elektrod są luźne i nie są naciągnięte. Napięcie przewodów może spowodować uszkodzenie elektrod.

Zdejmowanie elektrod:

1. Po zakończeniu zabiegu upewnij się, że urządzenie **mamaTENS**, **perfect mamaTENS** lub **perfect mama+** jest wyłączone, zanim zdejmiesz elektrody ze skóry.
2. Zdejmuj elektrody, odklejając je od krawędzi. Nie ciągnij za przewód.
3. Między zabiegami umieść elektrody z powrotem na foliach ochronnych, włóż je do woreczka i szczelnie zamknij.

Ważne informacje

1. Należy przestrzegać wszystkich przeciwwskazań, środków ostrożności i ostrzeżeń zawartych w instrukcji urządzenia, z którym używane są elektrody.
2. Elektrody są przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta.
3. Nie stosować elektrod na skórę uszkodzoną ani na obszary o zaburzonym czuciu.

Ostrzeżenia



Nie ignoruj reakcji alergicznych na elektrody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry przerwij stosowanie urządzenia - niewielka liczba użytkowników może wykazywać reakcję niepożądaną na żel.



Elektrody przeznaczone są wyłącznie do stosowania z elektrostymulatorami dopuszczonymi do użytku zgodnie z normami EN 60601-1 oraz EN 60601-2-10.

Wytwórca: TensCare Ltd. 9 Blenheim Road Epsom Surrey KT19 9BE, Wielka Brytania Tel: +44(0) 1372 723434		Autoryzowany przedstawiciel w UE: Advena Ltd Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta info@advenamedical.com	EC REP 
Importer: TensCare Europe BV Juliana van Stolbergstraat 52 1723LD Noord-Scharwoude Holandia		Dystrybutor w Polsce: AP Plan Sp.J. ul. Wolności 13M lokal 102, 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 Sklep diaMedica	 www.diamedica.pl

Data ostatniej aktualizacji: 2026-01-14