

# Elektroda do stymulacji mięśni

## Instrukcja obsługi

**BIONEN**  
medical devices

SYMBOL	OPIS	<b>Producent:</b>   BIONEN s.r.l. Via P. Petrocchi, 42/1 - 50127 Florencja Włochy Tel.: +39 055 4265945 - Fax: +39 055 412188 www.bionen.it email: info@bionen.it
	Nie zawiera lateksu	
	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją	
	Urządzenie medyczne	
	Urządzenie klasy I. MDR (UE) 2017/745.	

DME 4046.113 – Rev. L – 07/06/2022-PL

Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-09

Kod	Wersja
0038.0xx	Elektroda do stymulacji mostkowa płaska z paskiem / uchwytem
0038.02x 0038.03x	Elektroda do stymulacji mostkowa z paskiem i podkładkami
0038.2xx	Elektroda do stymulacji z zapięciem na rzep
0039.0xx	Elektroda do stymulacji dwubiegunowa
0039.2xx	Elektroda do stymulacji jednobiegunowa

**PRZEZNACZENIE:** EMG – EP

**INSTRUKCJA UŻYCIA:** Oprzyj elektrodę z lekkim naciskiem na punkcie, który ma być stymulowany. W przypadku stymulatorów z elektrodami podkładowymi, zanurzyć je w 0,9% fizjologicznej temperaturze roztwór soli fizjologicznej. Oczyszczyć skórę pacjenta i umocuj elektrodę za pomocą paska. Podłącz wtyczki do urządzenia, upewniając się, że uzyskujesz najlepszą impedancję kontaktową.

**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:** Po każdym użyciu ostrożnie wyczyść elektrodę wilgotną szmatką/gazą. Nie zanurzaj w żadnym płynie.

W przypadku stymulatorów z podkładkami, po każdym badaniu należy oczyścić filce wodą z neutralnym detergentem.

**DEZYNFEKCJA:** Dezynfekować za pomocą Amocidu, Lizoforminy, Alhyndexu, IndicinGG lub produktami równoważnymi, również w wysokim stężeniu, bez zanurzania całej elektrody w płynach.

**METODA STERYLIZACJI:** urządzenie NIESTERYLNE, którego nie można sterylizować przed użyciem.

**ŻYWOTNOŚĆ:** Po 5 latach od sprzedaży, nie ma gwarancji prawidłowego funkcjonowania elektrody.

**PRZECHOWYWANIE:** Szczególne środki ostrożności dotyczące przechowywania nie są konieczne, ale Najlepiej po umyciu włożyć elektrody do pudełka.

**PRZECIWWSKAZANIA I SKUTKI UBOCZNE:** brak.

**DEKLAROWANA MOŻLIWA TOKSYCZNOŚĆ:** brak. NIE ZAWIERA LATEKSU.

**OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

**TRANSPORT I UTYLIZACJA:** brak specjalnych sposobów transportu i utylizacji.

**OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE:** Nie nakładz na elektrodzie nadmiernych obciążeń.

**UTYLIZACJA ODPADÓW:** produkt należy zagospodarować jako odpady sanitarne w zgodności z obowiązującymi przepisami.

### Dystrybutor:

AP Plan Sp.J.  
ul. Wolności 13M lokal 102  
64-130 Rydzyna  
Sklep medyczny: **diaMedica**  
TEL: 65 619 3855  
[www.diamedica.pl](http://www.diamedica.pl)

