

Kompres elektryczny MamaTerm MT^{ph} na pierś



dagapharma

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPIS TREŚCI:

Ważne uwagi.....	2
Zastosowania	3
Sterownik kontrolny.....	3
Tryby działania	4
Automatyczne zmniejszenie temperatury.....	4
Instrukcja stosowania	4
Specyfikacja programu DGterm.....	5
Walory jakości DAGA	5
Przechowywanie	5
Czyszczenie i konserwacja.....	5
Postępowanie z odpadami.....	5
Rozwiązywanie problemów	6
Gwarancja	6
Symbole stosowane na etykietach	7
Dane techniczne.....	7
KONTAKT.....	8

Ważne uwagi

Przed użyciem produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na później.



Uruchamianie:

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak na oznaczeniu widocznym przy urządzeniu lub przy odrębnym zasilaczu/ladowarce (o ile występuje). Używaj tylko oryginalnego zasilacza dedykowanego dla danego urządzenia.
- Jeśli urządzenie posiada odłączany sterownik, używaj tylko takiego sterownika, który został dostarczony wraz z urządzeniem. Nie zastępuj go sterownikiem od innych urządzeń.

Warunki prawidłowej eksploatacji urządzenia:

- Nie zaginaj elementów grzewczych, aby uniknąć tworzenia się trwałych załamania.
- Nie wkładaj do elementu grzewczego pinasek, igieł i innych ostrych przedmiotów.
- Nie zakrywaj urządzenia innymi przedmiotami podczas działania i nie umieszczaj go nad innymi urządzeniami grzewczymi.
- Nie używaj urządzenia przy wysokiej wilgotności i nie zanurzaj w wodzie. W celu wykonania czyszczenia urządzenia, postępuj zgodnie z rozdziałem „**Czyszczenie i konserwacja**”.

Ostrzeżenia:

- W przypadku osób niepełnosprawnych, z nadwrażliwością na ciepło, zarówno u dzieci jak i dorosłych, używaj urządzenia pod odpowiednim bezpośrednim nadzorem innej osoby.
- Urządzenie nie może być stosowane u osób, które są pod wpływem alkoholu, środków nasennych, uspokajających lub narkotyków.
- Nie używaj urządzenia do ogrzewania zwierząt.
- Ponieważ urządzenie emituje niewielkie pole elektromagnetyczne, osoby z rozrusznikiem serca lub innym urządzeniem wspomagającym krążenie powinny skonsultować stosowanie urządzenia z lekarzem.
- Wydłużone używanie urządzenia na maksymalnej mocy może doprowadzić do poparzenia skóry. Nigdy nie zasypiaj z włączonym urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w warunkach szpitalnych.
- Ważne jest, aby kabel połączeniowy nie był skręcony i nie leżał na urządzeniu podczas działania. Nie ciągnij za kabel, aby go odłączyć i nie wykorzystuj go jako uchwyt.

Często sprawdzaj urządzenie, jego sterownik, kabel i elementy grzewcze, czy nie posiadają oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zostaną one zauważone, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, nie będzie ono podlegało gwarancji.

Zastosowania

Wskazania w okresie ciąży i laktacji:

- Łagodzenie bólu w piersi wywołanego zmianami hormonalnymi okresu macierzyństwa.
- Poprawa drożności kanalika piersiowego poprzez zmniejszenie grudek mlekowych.
- Stymulacja wydzielania mleka dzięki rozszerzeniu naczyń pod wpływem ciepła.
- Łagodzenie bólu spowodowanego procesami zapalnymi przy infekcjach bakteryjnych w piersi (zastoinowe zapalenie gruczołu mlekowego).

Pozostałe wskazania:


- Dolegliwości mięśnia piersiowego.
- Stan zapalny gruczołu sutkowego.
- Bóle w piersi w okresie przedmiesiączkowym.
- Zmiany piersiowe typu mastopatia, torbiele.

Kompres MamaTerm, to wyjątkowy produkt na rynku z uwagi na swoją ergonomię i łatwe dopasowanie do dowolnego kształtu oraz rozmiaru piersi.

Sterownik kontrolny


Ekran:

- A** **DIODA BURSZTYNOWA:**
Oznacza, że jest aktywny tryb programu DGterm.
- B** **DIODY CZERWONE:**
Oznaczają poziom wybranej temperatury.
- C** **DIODY ZIELONE:**
Oznaczają wybrany czas automatycznego wyłączenia.
- D** **WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK (0/I)**

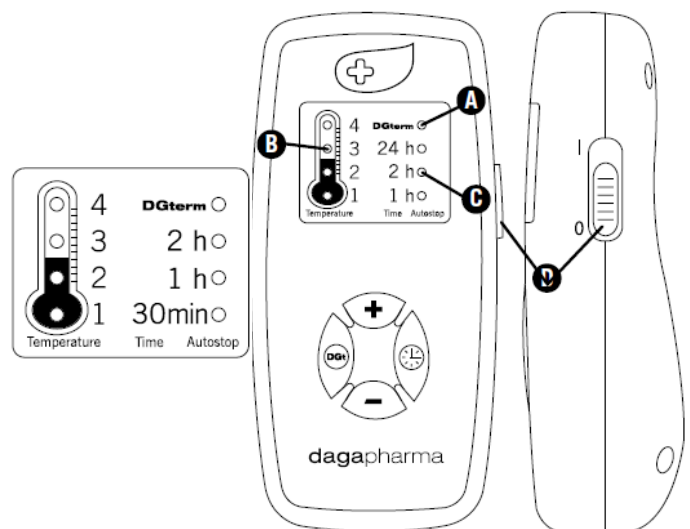

Przyciski:

- E** PRZYCISK ZWIĘKSZANIA TEMPERATURY
- F** PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA TRYBU PROGRAMOWEGO DGterm
- G** PRZYCISK WYBORU CZASU AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA (TRYB AUTO-STOP)
- H** PRZYCISK ZMNIĘSZANIA TEMPERATURY

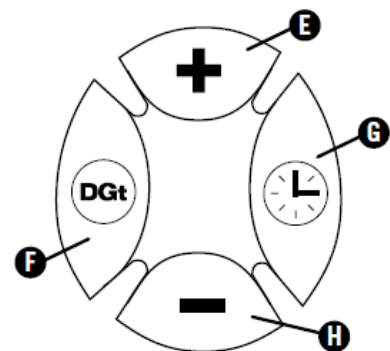

Tryby działania

Urządzenie może znajdować się trzech trybach pracy:

1. **Tryb wolny (domyślnie):** urządzenie działa nieprzerwanie przy temperaturze wybranej przez użytkownika.
2. **Tryb AUTO-STOP (automatycznego wyłączenia):** urządzenie rozpoczyna działanie przy temperaturze wybranej przez użytkownika i pracuje przez wybrany okres czasu, po czym automatycznie wyłącza się.
3. **Tryb DGterm:** urządzenie rozpoczyna działanie, gdzie temperatura i czas pracy jest stale kontrolowana przez wbudowany program zgodnie z podziałem na fazy pracy.

Automatyczne zmniejszenie temperatury

Aby nie narazić użytkownika na pozostawanie w wysokiej temperaturze przez długi okres czasu, w trybach **1** oraz **2** sterownik nieustannie monitoruje przebieg pracy urządzenia, w tym utrzymywaną temperaturę. Temperatura pracy może zostać obniżona do niższego poziomu, jeśli praca przy wysokiej temperaturze będzie trwać ok. 2 godzin, co zostanie uwidocznione na czerwonych diodach, które zaczną wskazywać niższy poziom.

Instrukcja stosowania

1. Podłącz kabel od zasilacza do sterownika, a następnie włóż zasilacz do gniazda sieciowego.
2. Włącz urządzenie poprzez przesunięcie przycisku włącznika w pozycję „1”. Sterownik od razu wykonana test urządzenia, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości, a następnie, jeśli wszystko przebiegnie poprawnie, zostanie domyślnie wybrany: **poziom temperatury 1** (minimalny, zapali się jedna czerwona dioda) oraz **tryb wolny** (tryby AUTO-STOP oraz DGterm są nieaktywne).
3. Za pomocą przycisków „+” i „-”, wybierz wymagany poziom temperatury. Od tej chwili urządzenie będzie pracować w **trybie wolnym**. Oznacza to, że jedynymi aktywnymi wskaźnikami będą czerwone diody określające wybrany poziom temperatury.
4. Jeśli to konieczne, możesz w dowolnym momencie za pomocą przycisku „⌚” wybrać wymagany czas pracy (30min-1h-2h), co oznacza przejście do **trybu AUTO-STOP**. Zostanie to uwidocznione za pomocą zielonych diod (brak jakiegokolwiek zapalanej diody zielonej oznacza, że urządzenie pracuje w **trybie wolnym**). Po upływie wybranego czasu zabiegu w **trybie AUTO-STOP**, grzanie zostanie przerwane i wszystkie czerwone diody zgasną. Będą się paliły jedynie diody zielone, zgodnie z ostatnio ustawionym czasem pracy. Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do **trybu wolnego**.
5. Możesz również w dowolnej chwili aktywować **tryb DGterm**, do czego służy przycisk „DG”. Zapali się wtedy od razu bursztynowa dioda (na samej górze) i kontrolę nad urządzeniem przejmie wbudowany program, który będzie samodzielnie cyklicznie uruchamiał różne poziomy grzania. Przyciski regulacji poziomu temperatury oraz czasu pracy, są w tym momencie zablokowane. Możesz w dowolnej chwili wyjść z **trybu DGterm** poprzez naciśnięcie przycisku „DG”. Jeśli poczekaś do końca trwania programu DGterm, grzanie wyłączy się automatycznie i wszystkie czerwone diody zgasną. Będzie się paliła tylko dioda bursztynowa. Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do **trybu wolnego**.
6. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć przycisk włącznika w pozycję „0”.

Gdy po wyłączeniu urządzenie pozostaje ciepłe, pozwól, aby się schłodziło, zanim zostanie złożone i schowane.

Specyfikacja programu DGterm

Liczba faz	Czas fazy [min]	Czas całkowity [min]	Sekwencje temperatury
6	10	1	4-1-4-1-4-1

Walory jakości DAGA

Technologia Daga **Flexy Heat** gwarantuje, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i skontrolowany przy użyciu najnowszych technologii i zgodnie ze standardami najwyższej jakości. Wszystkie elementy grzejne są produkowane przy użyciu wyłącznie starannie dobranych i przetestowanych materiałów, aby dostarczyć produkt idealny do bezpośredniego stosowania, o długiej żywotności i wolny od wad.

Dokładność elektronicznego układu sterowania zapewnia inteligentną regulację ciepła podczas nadzorowania prawidłowego działania produktu, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania.

Dzięki specjalnej konstrukcji, wszystkie produkty wykonane w technologii Daga Flexy Heat generują bardzo słabe pole elektromagnetyczne (EMF). W ten sposób, użytkownik nie jest narażony na promieniowanie podczas korzystania z produktu i nie ma zakłóceń innych urządzeń elektronicznych.

Przechowywanie

Jeśli nie zamierzasz stosować urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód połączeniowy. Zwiększy to żywotność urządzenia. Przechowuj urządzenie w jego oryginalnym opakowaniu i umieść w suchym miejscu, bez pośladków i zagięć. Nie umieszczaj na nim żadnych ciężkich przedmiotów.

Czyszczenie i konserwacja

W przypadku oznak zawilgocenia, wysusz urządzenie, zanim zostanie podłączone do prądu.

Aby wyczyścić zewnętrzną powłokę materiałową, zdejmij ją z urządzenia. Może być brana w pralce w temperaturze maksymalnie 50 °C i z wykorzystaniem woreczka do prania tkanin delikatnych.

Wewnętrzny, plastikowy wkład grzewczy można czyścić wilgotną i miękką szmatką.

Postępowanie z odpadami



Kiedy urządzenie zakończy swój okres eksploatacji, należy postępować zgodnie z regulacjami dotyczącymi zwrotu i zbierania odpadów, które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 2002/96/EC-WEEE. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Pomóż nam chronić środowisko.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Po włączeniu bocznego przycisku, na ekranie sterownika nic się nie pokazuje.	Sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do sieci. Sprawdź, czy przycisk boczny jest na pewno w pozycji „I”.
Po włączeniu urządzenia, ekran nie jest ustawiony w trybie wolnym (poziom temperatury 1) i urządzenie nie działa.	Sterownik mógł wykryć jakieś nieprawidłowości podczas testu sprawdzającego. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem występuje dalej, skontaktuj się z serwisem.
Po włączeniu urządzenia, ekran jest ustawiony prawidłowo w trybie wolnym (poziom temperatury 1), ale urządzenie nie grzeje.	Jeśli stwierdzisz brak grzania, ustaw poziom temperatury na maksymalny i odczekaj 45 minut. Jeśli nadal nic nie grzeje, skontaktuj się z serwisem. <u>Urządzenie nie jest w stanie właściwie ocenić temperatury zewnętrznej, dlatego może błędnie określić temperaturę grzania.</u>
Emitowane ciepło nie jest wystarczające.	Jeśli przy maksymalnym poziomie temperatury odczuwane ciepło wydaje się zbyt słabe, radzimy przyłożenie elementu grzejącego bezpośrednio na skórę, zakrywając drugą stronę ręcznikiem lub innym okryciem, co powinno zmniejszyć rozpraszanie ciepła.
Ekran wyświetla niezrozumiałe informacje. Diody LED mrugają nieprzerwanie.	Może to oznaczać nieprawidłowe działanie sterownika i wewnętrzny system bezpieczeństwa zablokował działanie urządzenia. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem występuje dalej, skontaktuj się z serwisem.










Urządzenie osiąga maksymalne temperatury w zakresie 65-75 °C. Jest to wartość orientacyjna określona na podstawie pomiarów laboratoryjnych zgodnych procedurą opisaną w normie UNE-EN-60335-2-17.

Gwarancja

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta licząc od daty zakupu. . Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie opisanym w dokumentacji, przypadkowymi awariami (upuszczenie, spalenie, uruchomienie po zamoczeniu itp.), samodzielnymi modyfikacjami, naprawami, złym obchodzeniem się. Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i fabryczne.

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na końcu instrukcji obsługi.

Symbole stosowane na etykietach

-  Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
-  Unikaj zgięć i pofałdowań.
-  Nie wkładaj pinesek, igieł i innych metalowych przedmiotów.
-  Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zużytym sprzętem elektrycznym.
-  Nie używaj żelazka.
-  Nie stosuj środków wybielających.
-  Nie wolno prać chemicznie.
-  Nie susz maszynowo.
-  Nie wolno prać.

Dane techniczne

Pobór mocy	22 W
Zasilanie	Zasilacz 12V
Długość całkowita	35 cm
Średnica	23 cm
Czas pracy	30, 60 lub 120 min

KONTAKT

Wytwórca:

DAGAPHARMA (Grupa DAGA)
Rambla Nova, 65
08100 Mollet Del Valles (Barcelona)
Hiszpania
TEL: (093)593 03 31 · sat@eedaga.es



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
Os. Wieniawa 57a
64-100 Leszno
Sklep medyczny: **diaMedica**
www.diamedica.pl



TEL: **65 619 3855**

Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone.

Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20