

Masażer oczu OKO

Instrukcja obsługi



Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Spis treści

01. Wprowadzenie	3
02. Zawartość zestawu.....	3
03. Technologie masażu	3
04. Punkty akupresurowe	4
05. Sposób użycia.....	4
06. Połączenie Bluetooth.....	5
07. Czyszczenie i konserwacja	5
08. Ładowanie	5
09. Środki ostrożności.....	5
10. Gwarancja	6
11. Warunki użytkowania, przechowywania i transportu	6
12. Utylizacja	7
13. Dane techniczne	7

01. Wprowadzenie

Masażer oczu OKO wykorzystuje technologię masażu powietrznego, wibracyjnego i termicznego (ciepłego kompresu), aby masować skronie i kluczowe punkty akupresurowe wokół oczu.

Masowanie tych punktów może pomóc w łagodzeniu zmęczenia oczu, uśmierzaniu bólów głowy, redukcji cieni pod oczami, a także działa relaksująco - zmniejsza napięcie, stres i ułatwia zasypianie.

Urządzenie posiada również łączność Bluetooth, dzięki której można odtwarzać muzykę z telefonu lub innego źródła dźwięku.

Masażer jest składany - idealny w podróży – i wyposażony w zintegrowany akumulator wielokrotnego ładowania.

Doskonale sprawdza się w domu, a także jako praktyczny towarzysz w podróży.

02. Zawartość zestawu

1 × masażer oczu OKO

1 × przewód USB typu C do ładowania

1 × instrukcja obsługi

03. Technologie masażu


- **Masaż powietrzny:** naprzemienne kurczenie i rozluźnianie poduszki powietrznej masuje kluczowe punkty akupresurowe wokół oczu.
- **Masaż wibracyjny:** symuluje tradycyjne techniki masażu, takie jak oklepywanie i uciskanie, masując okolice oczu.
- **Ciepły kompres:** dostarcza dodatkowego ukojenia oraz może poprawiać krążenie krwi w okolicy oczu.

04. Punkty akupresurowe

Masaż następujących punktów przynosi różnorodne korzyści:

Punkt Zan Zhu

łagodzi zatłkane zatoki, swędzenie, łzawienie i zaczerwienienie oczu.

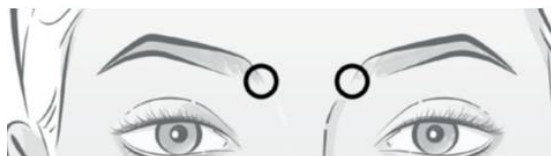

Punkt Si Zhu

pomaga złagodzić migreny i bóle głowy spowodowane zmęczeniem wzroku.



Punkt Cheng Qi

stosowany przy zapaleniu spojówek, obrzękach i bólu oczu.



Punkt Yang Bai

redukuje drganie powiek i bóle głowy.



Punkt Yu Yao

łagodzi zaczerwienienie, obrzęk, ból i drganie powiek.



05. Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna, korzystając z przewodu USB-C dołączonego do zestawu.

1. Załóż masażer na głowę tak, aby opaska dokładnie zakrywała oczy.
W razie potrzeby wyreguluj elastyczny pasek, aby uzyskać wygodne dopasowanie.
Uwaga: przed użyciem zdejmij soczewki kontaktowe.
2. Włącz urządzenie, naciskając przycisk sterowania w prawym górnym rogu obudowy. Automatycznie uruchomi się tryb masażu 1.
3. Naciskaj przycisk sterowania, aby przetaczać między 5 trybami masażu:
 - a. Tryb wolny – masaż powietrzny i ciepło
 - b. Tryb witalności – masaż powietrzny, wibracje i ciepło
 - c. Tryb pielęgnacji oczu – masaż powietrzny i wibracje
 - d. Tryb redukcji napięcia – masaż powietrzny
 - e. Tryb snu – ciepło
4. Zalecany czas masażu: 15 minut.
5. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk sterowania na górze obudowy.

06. Połączenie Bluetooth

Połączenie Bluetooth aparatu OKO jest aktywowne cały czas.

Aby sparować urządzenie:

- Włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu i wyszukaj „OKO”.
- Po połączeniu masażer wyemituje komunikat „Bluetooth connected” (Bluetooth połączony).
- Jeśli nie możesz się połączyć, upewnij się, że urządzenie nie jest już sparowane z innym telefonem – rozłącz je, a następnie spróbuj ponownie.

07. Czyszczenie i konserwacja

Czyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką.

Nie używaj agresywnych lub lotnych środków czyszczących.

Przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od promieni słonecznych, wysokiej temperatury i wilgoci.

08. Ładowanie

Gdy poziom akumulatora jest niski, masażer wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.

Naładuj urządzenie, podłączając je do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB-C.

W trakcie ładowania miga wskaźnik ładowania a po pełnym naładowaniu świeci się stale.

Czas ładowania: ok. 2–3 godziny.

Czas pracy po pełnym naładowaniu: 3,5–4,5 godziny.

Aby zachować żywotność akumulatora, ładuj go co najmniej raz w miesiącu, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

09. Środki ostrożności

- Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje.
- Przed rozpoczęciem masażu przetrzyj miękką, wilgotną ściereczką poduszkę materiałową znajdującą się wewnątrz urządzenia.
- Nie zezwalaj na korzystanie z masażera osobom, które nie są w stanie zrozumieć instrukcji, ani osobom z zaburzeniami poznawczymi, np. cierpiącym na chorobę Alzheimera lub demencję.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz wrażliwą skórę lub jeśli nie odczuwasz ciepła.
- Masażer nie powinien być stosowany przez:
 - kobiety w ciąży,
 - osoby z chorobami serca,
 - osoby z nadciśnieniem lub niedociśnieniem,
 - osoby z nowotworami złośliwymi,
 - osoby z chorobami mózgu i układu krążenia (np. udar, tętniak),
 - osoby w stanie ostrych chorób lub będące pod opieką lekarską.
- Przerwij natychmiast używanie urządzenia i skontaktuj się z lekarzem, jeśli w trakcie masażu pojawi się złe samopoczucie, zawroty głowy, podrażnienie skóry lub jakiegokolwiek inne niepokojące objawy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz objawy chorób oczu lub jesteś pod nadzorem okulisty.
- Nie stosuj masażera, jeśli przeszedłeś operację oczu, cierpisz na jaskrę, zaćmę, odwarstwienie siatkówki lub inne schorzenia narządu wzroku.
- Nie używaj masażera w wysokich temperaturach, w pobliżu łatwopalnych substancji, w środowisku o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym ani w warunkach dużej wilgotności.
- Nigdy nie rozbieraj urządzenia bez upoważnienia.
- Chroń je przed uderzeniami i kontaktem z wodą, aby uniknąć uszkodzenia.

10. Gwarancja

Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu.

Gwarancja traci ważność, jeśli produkt został zmodyfikowany lub przerobiony, używany w sposób niewłaściwy, uszkodzony mechanicznie, zalany wodą, upuszczony, niewłaściwie konserwowany lub naprawiany bez autoryzacji firmy TensCare Ltd.

Utrata gwarancji następuje również, jeśli uszkodzenia powstały w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Produkty TensCare objęte są gwarancją, które zapewnia klientowi prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli nie spełnia on wymogów jakościowych.

Przed wystaniem urządzenia do serwisu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i upewnić się, że problem nie wynika z nieprawidłowego użytkowania.

W przypadku potrzeby naprawy w okresie gwarancyjnym należy przestać urządzenie wraz z następującymi danymi: Imię i nazwisko, Adres, Numer telefonu, Adres e-mail, Dowód zakupu. Zwroty należy kierować na adres dystrybutora wymienionego na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

11. Warunki użytkowania, przechowywania i transportu

Normalne warunki pracy:

Temperatura otoczenia: +5°C do +40°C

Wilgotność względna: ≤ 80%

Ciśnienie atmosferyczne: 86–106 kPa

Warunki transportu i przechowywania:

Zakres temperatur: –20°C do +55°C

Wilgotność względna: ≤ 93%

Ciśnienie atmosferyczne: 50–106 kPa


12. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, aby uniknąć jego zanieczyszczenia.

Wbudowany akumulator litowy zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska, dlatego należy go usunąć przed wyrzuceniem urządzenia.

Przed demontażem urządzenia i wyjęciem baterii należy je wyłączyć lub odłączyć od zasilania.

Aby wyjąć akumulator litowy rozmontuj produkt w kolejności oznaczonej numerami 1–5.

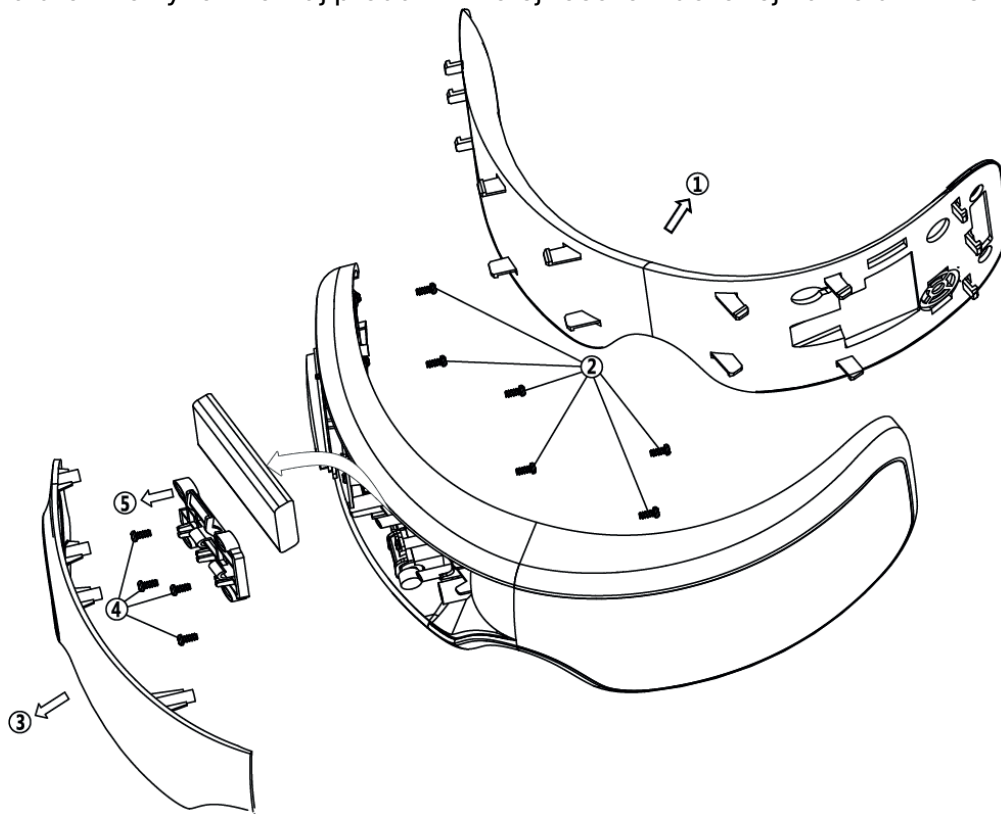

Zużyte akumulatory należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub autoryzowanego centrum recyklingu.

13. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Masażer oczu OKO (OKO Eye Massager)
Napięcie ładowania	5 V, 1000 mA
Pojemność akumulatora	3,7 V, 1450 mAh
Żywotność baterii	ok. 3 lata lub 2500 cykli ładowania
Moc wejściowa	5 W
Wymiary opakowania	185 × 149 × 87 mm
Masa netto	326 g

Producent:

Shenzhen Pango Medical Electronics Co., LTD.
 No.25 Fenghuang Road, Xikeng Yicun Industrial Zone,
 Henggang Street,
 Longgang District, Shenzhen,
 CHINY

**Dystrybutor globalny:**

TensCare Ltd
 9 Blenheim Road
 Epsom, Surrey
 KT19 9BE, Wielka Brytania
 Więcej informacji: +44 (0)1372 723 434

**Podmiot odpowiedzialny w UE:**

TensCare Europe BV
 Juliana van Stolbergstraat 52
 1723LD Noord-Scharwoude
 Holandia

**Dystrybucja w Polsce:**

AP Plan Sp.J.
 ul.Wolności 13M lokal 102
 64-130 Rydzyna
 TEL: 65 619 3855
 Sklep medyczny diaMedica



www.diamedica.pl