

Maty do magnetoterapii

Globus Memory Foam

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE


Instrukcja obsługi

Modele:

- **MAT 100 Memory Foam** – moduł pojedynczy na 1 kanał
- **TOTAL BODY 200 Memory Foam** – 4 moduły w tym 2 aktywne na 2 kanały
- **TOTAL BODY 400 Memory Foam** – 4 moduły w tym 4 aktywne na 2 kanały
- **TOTAL BODY 400 XP Memory Foam** – 4 moduły w tym 4 aktywne na 4 kanały



Pianka „Memory”

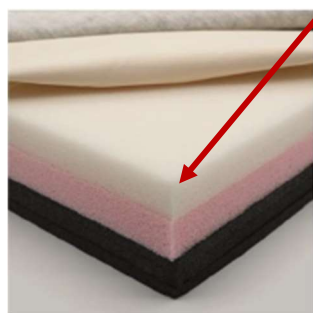

MAT 100



TOTAL BODY



Maty do magnetoterapii firmy Globus mogą być używane ze wszystkimi aparatami linii Magnum, za wyjątkiem Magnum L.

Maty modułowe „**TOTAL BODY**” składają się z 4 modułów, z których w zależności od modelu można wyróżnić moduły aktywne typu **MAT 100 Memory Foam** lub neutralne. Jeden moduł aktywny zawiera w sobie 4 elektromagnesy, które są podłączone szeregowo i wykorzystują razem jeden kanał aparatu Magnum. Mata neutralna nie posiada żadnych elektromagnesów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wymiary
 - MAT 100 Memory Foam – 44 x 70 cm (grubość: 65 mm).
 - TOTAL BODY Memory Foam – 176 x 70 cm (4 odczepiane moduły)
- Warstwy wewnętrzne: górna warstwa dwóch pianek plastycznych o różnej twardości (małej i średniej) i podwójna dolna warstwa z twardej pianki poliuretanowej zawierająca elektromagnesy.
- Zewnętrzna poszewka: materiał hipoalergiczny nadający się do prania z antypoślizgowym spodem (sprawdź warunki prania na etykiecie wewnętrznej).
- Wewnętrzna poszewka: materiał wodoodporny i antybakteryjny.

Warunki przechowywania i transportu

- Temperatura przechowywania i transportu: od -25°C do +70°C
- Wilgotność względna: 0%-93%.
- Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa

Warunki pracy

- Temperatura pracy: od 0°C do +70°C
- Wilgotność względna: 15%-93%.
- Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa


PRZEZNACZENIE

Do zastosowań domowych lub profesjonalnych w połączeniu z urządzeniami do magnetoterapii linii Globus Magnum.

KONFIGURACJA MAT „TOTAL BODY”


- **Total Body 200 Memory Foam**

2 aktywne moduły (łącznie 8 elektromagnesów) i 2 neutralne bez elektromagnesów. Wykorzystywane są 2 kanały urządzenia Magnum. Poszczególne moduły można łączyć dowolnie umieszczając aktywne moduły w miejscach wymagających leczenia. Przykładowe konfiguracje:

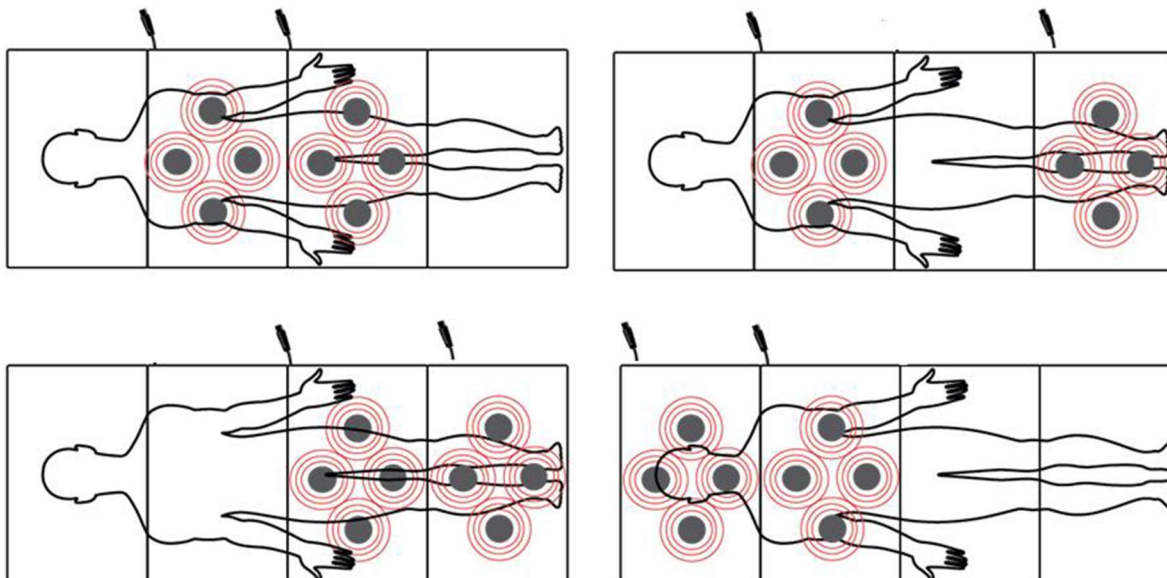


- **Total Body 400 Memory Foam**

4 aktywne moduły (łącznie 16 elektromagnesów). Wykorzystywane są 2 kanały urządzenia Magnum. Każdy kanał obsługuje 2 moduły, co oznacza, że moc jednego kanału rozkłada się równomiernie na 2 moduły.

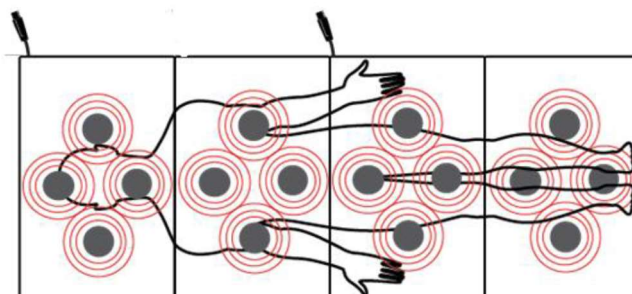


- **Total Body 400 XP Memory Foam**

4 aktywne moduły (łącznie 16 elektromagnesów). Współpracuje tylko z 4-kanałowym urządzeniem Magnum 3500 Pro. Każdy moduł jest podłączony do dedykowanego kanału, co pozwala na osiągnięcie pełnej mocy na całej powierzchni maty, wyższej w porównaniu z matą Total Body 400 Memory Foam.

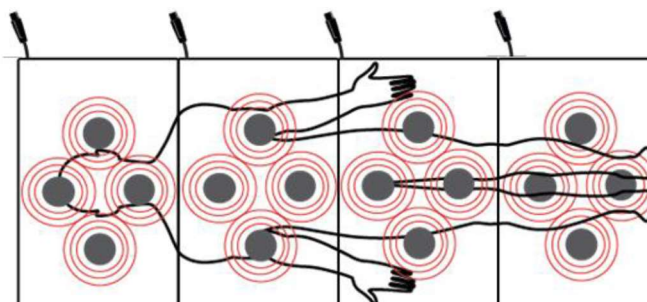


PODŁĄCZENIE MATY DO URZĄDZENIA


Przewód doprowadzeniowy wychodzący z maty

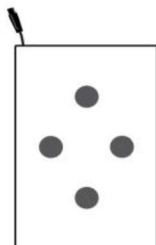

Aby podłączyć przewód wychodzący z maty do urządzenia, włóż wtyczkę przewodu do odpowiedniego gniazda w górnej części urządzenia. Mała wypustka na wtyczce powinna być skierowana w dół.

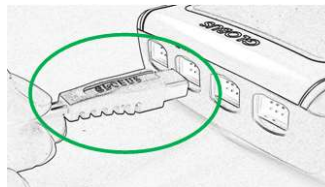

TAK

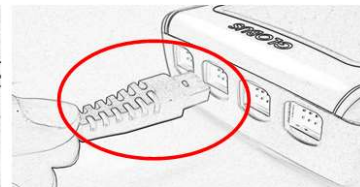

NIE

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE MAT „TOTAL BODY”

Aktywne moduły mat **Total Body 200** oraz **Total Body 400 XP** podłącz do wybranych kanałów urządzenia.

W przypadku maty **Total Body 400**, moduły aktywne są na danym kanale połączone są w pary za pomocą cienkich przewodów.



Wyprowadź czarne i czerwone przewody wychodzące z otworów każdej maty, jak na zdjęciu. W module z przewodem zasilającym, dwa krótkie przewody wychodzą z tej samej strony, podczas gdy w drugiej macie, dwa krótkie przewody wychodzą po prawej stronie, dzięki czemu są blisko i można je połączyć.

Połącz ze sobą dwa małe czerwone przewody oraz czarne.



Pierwsze dwa moduły są połączone. Wykonaj te same czynności przy połączeniu dwóch kolejnych modułów.



OBSŁUGA MATY MAT 100

Mata MAT 100 Memory Foam posiada w środku 4 elektromagnesy, co pozwala na leczenie dużej powierzchni bez konieczności korzystania tradycyjnych aplikatorów na powierzchni ciała. Może na niej siedzieć na kanapie, na krześle lub leżeć na niej w łóżku. Można też matę położyć na dowolnym miejscu ciała.

Mata MAT 100 Memory Foam może być stosowana samodzielnie lub może być w prosty łączona z inną matą MAT 100 lub matą neutralną.

OBSŁUGA MAT „TOTAL BODY”

Maty „TOTAL BODY” pozwalają na wykonywanie zabiegu na jeszcze większej powierzchni w pozycji leżącej. Ułóż matę „TOTAL BODY” na tradycyjnym łóżku z materacem lub innym podłożu, aby wszystkie kable wychodziły na jedną stronę łóżka, przy krawędzi, co ułatwi podpięcie urządzenia Magnum. Zalecamy nakryć matę prześcieradłem, aby dłużej utrzymać odpowiednią czystość.

Uwaga: Powierzchnia pod matą powinna być gładka. Jeśli na macie są wyczuwalne wybrzuszenia, to rozepnij oba pokrowce maty i sprawdź położenie elektromagnesów między dwiema szarymi piankami, aby były odpowiednio włożone w otwory.

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Mata magnetyczna jest zwykle stosowana wg wskazań lekarza. W zależności od rodzaju schorzenia, może być stosowana nawet podczas snu. Jeśli chodzi o intensywność pola magnetycznego, to w porównaniu z typowymi elastycznymi aplikatorami, mata magnetyczna nieco zmniejsza działanie pola, dlatego zalecamy zwiększyć intensywność na urządzeniu o 15-20 Gs.

Po zainstalowaniu maty i położeniu się na niej, włącz urządzenie Magnum i rozpocznij zabieg zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

- Jeśli mata nie jest używana przez dłuższy czas, zalecamy włożenie jej z powrotem do oryginalnego opakowania i przechowywanie w suchym oraz czystym miejscu.
- Zalecamy czyścić, jeśli to konieczne, tylko zewnętrzną poszewkę. Jeśli to jest rzeczywiście potrzebne, to można też wyczyścić wewnętrzną powłokę, pamiętając aby nie naruszyć prawidłowego ułożenia wewnętrznych elektromagnesów.
- Przed czyszczeniem/praniem, zabezpiecz boczny męski rzep poprzez przyłączenie do niego oddzielnego paska rzepu żeńskiego dostarczonego wraz z matą. Zabezpieczy to włókna rzepu przed uszkodzeniem podczas prania.
- Instrukcje dotyczące prania znajdują się na etykietach poszewek.

ETYKIETY I SYMBOLE

	Wskazanie na datę produkcji
	Informacja o względnej wilgotności w warunkach przechowywania i transportu w miejscu stosowania urządzenia i akcesoriów.
	Oznaczenie optymalnej temperatury przechowywania i transportu urządzenia.
	Informacja dla użytkownika, aby przed użyciem urządzenia zapoznał się koniecznie z instrukcją obsługi.
	Ten symbol oznacza zgodność z wymaganą dyrektywą dotyczącą znaku CE.
	Symbol recyklingu WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych śmieci komunalnych. Wymagają prawidłowego pozbywania się w celu ochrony środowiska naturalnego. Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub skontaktuj się z firmą zbierającą odpady lub ze sprzedawcą.

GWARANCJA

Mata jest objęta gwarancją obejmującą wady fabryczne przez okres 24 miesięcy od daty nabycia. Same poszewki są objęte gwarancją 6 miesięcy od daty nabycia.

Wytwórca i serwis:

DOMINO s.r.l.

via Vittorio Veneto 52

31013 - Codognè - TV - WŁOCHY

Tel. (+39) 0438.7933

E-Mail: info@globuscorporation.com

www.globuscorporation.com



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.

Os. Wieniawa 57a

64-100 Leszno

Sklep medyczny: **diaMedica**

TEL: **65 619 3855**



www.diamedica.pl