

Mata do magnetoterapii Globus B-MAT

Instrukcja obsługi

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

Mata B-MAT do magnetoterapii firmy Globus posiada budowę modułową i składa się z 2 rodzajów elementów:

- **MAT 100** – mata aktywna zawierająca w sobie 4 elektromagnesy, które mogą być podłączone do jednego kanału aparatu Magnum.
- **N-MAT** – mata neutralna, która nie posiada elektromagnesów.

Maty MAT 100 oraz N-MAT mają jednakowy rozmiar 70 x 44 cm i mogą być ze sobą łączone szeregowo tworząc jedną matę typu B-MAT o długości 176 cm, która w zależności od ilości zastosowanych mat aktywnych może występować w następujących konfiguracjach:


- **B-MAT 200** – 2 x MAT 100 oraz 2 x N-MAT (8 elektromagnesów)
- **B-MAT 300** – 3 x MAT 100 oraz 1 x N-MAT (12 elektromagnesów)
- **B-MAT 400** – 4 x MAT 100 (16 elektromagnesów)

Poniższy rysunek obrazuje przykładowe rozmieszczenia elementów MAT 100 i N-MAT dla modelu **B-MAT 200**:



Mata aktywna **MAT 100** zawiera cztery elektromagnesy, które są zorientowane na północ od strony przedniej i południowo po stronie tylnej.

Przód:
Od strony ciała

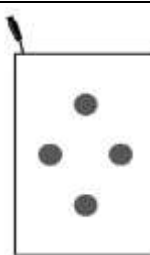


Tył:



Prąd jest doprowadzany do elektromagnesów poprzez wtyczkę wystającą z maty MAT 100.

- Połącz ze sobą elementy MAT 100 oraz N-MAT w taki sposób, aby pozwalały na leczenie wybranego obszaru ciała.
- W przypadku maty **B-MAT 400**, gdzie wszystkie cztery elementy są aktywne, jeśli stosujesz aparat 2-kanałowy, podłącz drugą matę za pomocą przewodów łączących.
- Połóż matę na podłodze, na łóżku, na leżance lub na krześle.
- Wtyczki wychodzące z MAT 100 podłącz do odpowiedniego kanału urządzenia Magnum za pośrednictwem przewodów doprowadzających, które powinny być wpięte do gniazda znajdującego się w urządzeniu (wyżłobienie na wtyczce przewodu doprowadzającego powinno być skierowane w dół).

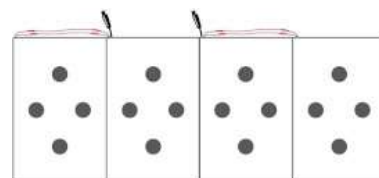

TAK



NIE

- Włącz urządzenie Magnum i rozpocznij zabieg zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Wytwórca i serwis:

DOMINO s.r.l.

via Vittorio Veneto 52

31013 - Codognè - TV - WŁOCHY

Tel. (+39) 0438.7933

E-Mail: info@globuscorporation.com

www.globuscorporation.com



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.

Os. Wieniawa 57a

64-100 Leszno

Sklep medyczny: **diaMedica**

TEL: **65 619 3855**



www.diamedica.pl