

Pas menstruacyjny **Ova Therma Belt**

Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie



Wprowadzenie

Pas menstruacyjny **Ova Therma Belt** zapewnia kojące ciepło i delikatny masaż, pomagając łagodzić objawy bólu menstruacyjnego.


Urządzenie zostało zaprojektowane do noszenia wokół talii i oferuje **trzy poziomy temperatury**, aby zapewnić maksymalną ulgę.

Sposób użycia

Załóż pas wokół talii – **na ubranie**, a nie bezpośrednio na skórę.

Pas można nosić na **dolnej części brzucha** lub **dolnej części pleców** – wybierz pozycję, która daje Ci największą ulgę.

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **grzania**, aby rozpocząć terapię ciepłą, lub przycisk **masażu**, aby włączyć masaż.
2. Wybierz żądaną temperaturę i tryb masażu, naciskając dalej odpowiednie przyciski.

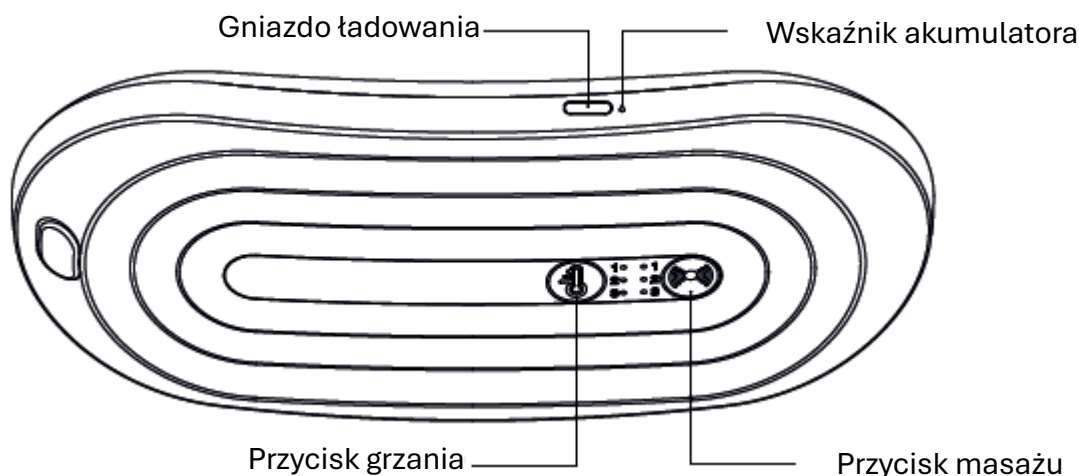

Funkcja	Pierwsze naciśnięcie	Drugie naciśnięcie	Trzecie naciśnięcie
Grzanie	50°C	55°C	60°C
Masaż	Tryb 1	Tryb 2	Tryb 3

Urządzenie można nosić tak długo, jak długo odczuwasz potrzebę ulgi, jednak **należy regularnie zmieniać położenie poduszki grzewczej**.

3. Aby wyłączyć funkcję grzania i/lub masażu, przytrzymaj dłużej odpowiedni przycisk – spowoduje to całkowite wyłączenie urządzenia.

Gdy poziom akumulatora jest niski, wskaźnik akumulatora zacznie migać na **czerwono**.

Pas menstruacyjny **Ova Therma Belt** można naładować, podłączając go do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla **USB-C**.

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest **w pełni naładowane**.

⚠ Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Zasady bezpieczeństwa

- Nie używaj, jeśli cierpisz na dnę moczaniową, raka szyjki macicy lub choroby serca.
- Nie używaj w czasie ciąży.
- Podczas długiego użytkowania regularnie zmieniaj pozycję poduszki. W razie nieprawidłowej reakcji skóry przerwij stosowanie.
- Nie używaj, jeśli masz wrażliwą skórę lub upośledzone czucie ciepła.
- Nie stosuj na uszkodzoną skórę lub niezagojone rany.
- Nie używaj podczas snu.
- Nie używaj w miejscach o wysokiej temperaturze, w pobliżu substancji łatwopalnych, źródeł promieniowania elektromagnetycznego ani w wilgotnym środowisku.

Gwarancja

Produkt objęty jest **roczną** gwarancją producenta od daty zakupu.

Gwarancja dotyczy jedynie urządzenia, nie obejmuje kabla ładującego.

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy:

- produkt został zmodyfikowany lub przerobiony,
- był niewłaściwie używany, zaniedbany, uszkodzony w transporcie,
- został zalany wodą,
- nie przestrzegano instrukcji obsługi,
- lub gdy naprawa została przeprowadzona bez autoryzacji producenta.

Przed wysłaniem urządzenia do serwisu dokładnie przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.

W razie potrzeby naprawy w okresie gwarancyjnym należy odesłać urządzenie wraz z następującymi danymi:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Data zakupu:

Dowód zakupu:

Zwroty należy kierować na adres dystrybutora podany na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Producent:

TensCare Ltd
9 Blenheim Road
Epsom, Surrey
KT19 9BE, Wielka Brytania
Więcej informacji: +44 (0)1372 723 434

**Podmiot odpowiedzialny w UE:**

TensCare Europe BV
Juliana van Stolbergstraat 52
1723LD Noord-Scharwoude
Holandia

**Dystrybucja w Polsce:**

AP Plan Sp.J.
ul. Wolności 13M lokal 102
64-130 Rydzyna
TEL: 65 619 3855
Sklep medyczny **diaMedica**



www.diamedica.pl

OVA

Therma Belt