

Żel intymny na bazie wody

Do stosowania jako medyczny żel nawilżający ułatwiający aplikację (poślizg) w okolicach intymnych, a także jako żel przewodzący przy elektrostymulacji. Produkt medyczny klasy I.

Kod produktu: **ti-1042** (PZN 1256635)

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

Żel na bazie wodnej, który działa jako przyjemny lubrykant, komfortowy i naturalny w odczuciach. Może być stosowany z lateksowymi prezerwatywami.

- Nie używaj, jeśli przy zakupie był otwarty lub uszkodzony.
- Do ogólnych potrzeb wymagający nawilżenia. Nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
- Przeźroczysty, bez substancji tłustych i kleistych.
- Nie podrażnia skóry i błon śluzowych.
- Zalecany do stosowania z urządzeniami medycznymi.
- Lepki i szybko rozsmarowuje się na powierzchniach.
- Nie niszczy części gumowych i metalowych oraz materiałów syntetycznych i naturalnych.
- Produkt medyczny przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta.
- Odpowiedni do codziennego stosowania.
- Skład: woda, sorbitol, hydroksyetyloceluloza, mleczan sodu, benzoetan sodu, pantenol, kwas mlekowy.

Ostrzeżenia:

- W przypadku wystąpienia podrażnień, przestań stosować żel i skonsultuj to z lekarzem.
- Żel nie zawiera środków plemnikobójczych.
- Przechowuj w temperaturze pokojowej.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- **Sposób stosowania:** stosuj i rozprowadzaj na skórze lub na urządzeniu medycznym – zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Wytwórca: LIVONDO GmbH Kurt-Schumacher-Str. 22 53113 Bonn, NIEMCY SRN: DE-MF-000013341	 	Dystrybucja w Polsce: AP Plan Sp.J. ul. Wolności 13M lokal 102 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 www.diamedica.pl  biuro@diamedica.pl
Wyprodukowano dla: tic Medizintechnik GmbH Endelner Feld 9 D-46286 Dorsten, Niemcy	 tic Medizintechnik	

Data ostatniej aktualizacji: 2026-01-05