

Membrana higieniczna PureSona™

Jak dotąd, najbardziej wydajna i najbardziej higieniczna membrana MDF®

- Do jednorazowego użytku
- Do stetoskopów dla dorosłych
- Lepsza czułość akustyczna
- Sprzedawana w opakowaniach po 50 szt
- Niesterylna

SKUTECZNA OCHRONA PRZED **PATOGENAMI**




Zdejmij zużytą membranę



Założ nową

Mniejsza stratność dźwięku = Lepsza jakość osłuchowa

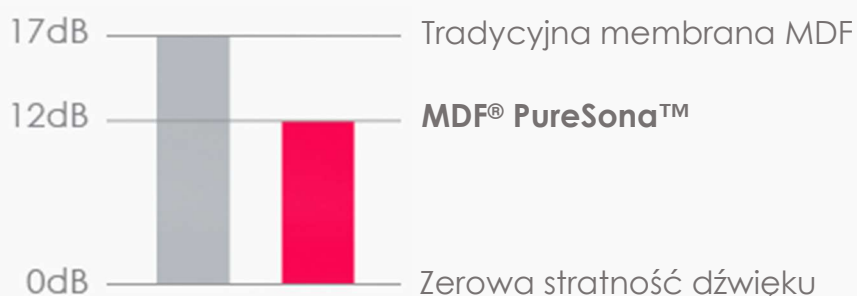

28%
redukcja
stratności dźwięku

=

5 dB
lepszą
głośność



Uniwersalne dopasowanie

Membranę MDF® PureSona™ można założyć na prawie każdy dostępny na rynku stetoskop dla dorosłych



- Po zdjęciu tradycyjnej membrany

Instrukcja instalacji membrany PureSona™ na głowicy



Podważ i zroluj lekko krawędź pierścienia.
* u innych producentów zdjęcie membrany może być inne



Zdejmij pierścień wraz z oryginalną membraną.



Zaczepek mały fragment membrany PureSona™ o krawędź głowicy.



Owiń dokładnie brzeg membrany PureSona™ na krawędzi głowicy, aż szczelnie pokryje całą membranową stronę głowicy.

Regularnie czyść całą słuchawkę 70% roztworem alkoholu izopropylowego.

Wykonane z czystego silikonu, niealergizującego i bezpiecznego dla środowiska

- bez lateksu ● bez pudru ● bez plastiku i bisfenolu A (BPA)

Popraw swój osobisty sprzęt ochronny

Jeśli w okresie pandemii **COVID-19** codziennie stosujesz jednorazowe rękawiczki, to czemu również nie używać membran **MDF® PureSona™** ?



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan S.J.

Os. Wieniawa 57a, 64-100 Leszno

TEL: 65 619 3855 • FAX: 65 619 3313 • biuro@diamedica.pl

diaMedica®

www.diamedica.pl

Wytwórca:

MDF Instruments Medifriend Inc.
3F Building 6, 1898 Lai Yin Road
Jiu Ting Town Song Jiang District
Shanghai 201615, Chiny



Autoryzowany przedstawiciel w UE:

Medical Technology Promedt Consulting
Altenhofstrasse 80
66386 St. Ingbert, Niemcy
email: info@mt-procons.com



EC REP

www.diamedica.pl/puresona